

Finalidade: São auxiliares manuseados por um braço, adequados para apoiar e / ou auxiliar a mobilidade de pessoas com dificuldades de locomoção;

Características: São fabricados em alumínio anodizado, possuem cabo anatômico e pontas de borracha antiderrapante;

Lote: Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

Data de produção: Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

Cor: Cinzento;

Caixa: 1 unidade;

Declaração de Conformidade: Diretiva 93/42/CEE;

Classificação: Classe 1;

Modelo: RP726;

Marca: Mopedia (Moretti);

Dimensões: 20x15x20;

Fabricante: Moretti S.P.A.;

Morada do fabricante: Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo);

Importador e Distribuidor: Gerimais;

Morada do Importador e Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Use apenas um pano húmido para remover a poeira, use um pano húmido com sabão neutro para remover a sujeira teimosa. Seque bem antes de usar; Se for necessário desinfetar o produto, use um detergente desinfetante comum;

Instruções de Utilização:

1. Segure o dispositivo com a mão oposta à perna fraca e com o lado mais comprido do berço voltado para dentro;
2. Traga o dispositivo para frente junto com o pé da perna fraca, colocando todo o peso na perna mais forte;
3. Ao caminhar, tome cuidado para não colocar o dispositivo muito próximo ao corpo para evitar tropeçar em uma das pontas ou muito longe para evitar desequilíbrio;
4. No caso de utilização em escadas, verifique se as dimensões do degrau são suficientes para conter a base do aparelho.

Imagens do Artigo:

