


Finalidade: Este pirâmide Quadripé é um auxiliar manuseado por um braço, adequados para apoiar e / ou auxiliar a mobilidade de pessoas com dificuldades de locomoção. Oferecem estabilidade em termos de equilíbrio e amparam quando há problemas de força.

Características: São fabricados em alumínio anodizado, base larga de quadripé, pega fechada anatômica com pontas de borracha antiderrapante e regulação em altura de 2,5 em 2,5cm. Cabo de polipropileno. Peso máximo suportado: 130Kg.

Cor: Cinzento

Dimensões: Ajustável em altura: 74 a 96 cm

Base: 31 x 26 x 25 cm

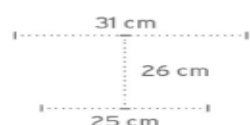

Peso: 640g.

Lote: Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

Data de produção: Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

Caixa: 1 unidade;

Declaração de Conformidade: Diretiva 93/42/CEE;

Classificação: Classe 1;

Modelo: RP724;

Marca: Mopedia (Moretti);

Fabricante: Moretti S.P.A.;

Morada do fabricante: Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo);

Importador e Distribuidor: Gerimais;

Morada do Importador e Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Para a segurança do paciente e do médico, recomenda-se mandar controlar a aptidão ao uso do seu produto ao fabricante ou a um laboratório autorizado, pelo menos de dois em dois anos. Em caso de reparação devem ser utilizados unicamente peças e acessórios originais. Use apenas um pano húmido para remover a poeira, use um pano húmido com sabão neutro para remover a sujeira teimosa. Seque bem antes de usar; Se for necessário desinfetar o produto, use um detergente desinfetante comum. Não utilize substâncias abrasivas, ácidos, álcool, detergentes à base de cloro, desinfetantes e acetona, porque provocam a abrasão dos componentes de plástico e criam ferrugem nas superfícies metálicas

Instruções de Utilização: Segure o dispositivo com a mão oposta à perna debilitada e com o lado mais comprido do braço voltado para dentro; Traga o dispositivo para frente junto com o pé da perna debilitada, colocando todo o peso na perna mais forte; Ao caminhar, tome cuidado para não colocar o dispositivo muito próximo ao corpo para evitar tropeçar em uma das pontas ou muito longe para evitar desequilíbrio; No caso de utilização em escadas, verifique se as dimensões do degrau são suficientes para conter a base do aparelho.

Imagens do Artigo:

