

Finalidade: Andarilho desmontável auxiliar, concebido para apoiar pessoas com limitações de mobilidade, proporcionando estabilidade e segurança durante a marcha.

Características: Produzido em aço com pintura especial, possui 4 rodas giratórias de 100 mm, sendo 2 com travões, apoio para antebraço de polipropileno ajustável em altura, e manoplas com regulagem de inclinação e largura. Pode ser utilizado com assento almofadado (opcional).

Capacidade máxima: 130 kg

Peso: 11 kg aprox.

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva Regulamento (UE) 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: RP755T

Marca: Mopedia By Moretti

Dimensões: Altura: 104-133 cm x Largura: 66 cm x Profundidade: 77 cm

Espaço útil: interno: 46 cm mesa: 42 cm

Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade) Regulamento (UE) 2017/745

Fabricante: Moretti

Morada do fabricante: Via Bruxelles, 3 – 52022 Cavriglia (Arezzo), Itália

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior 2040-357 Rio Maior- geral@gerimais.com Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: Limpar com pano húmido e secar bem; evitar produtos abrasivos ou corrosivos. Verificar regularmente o estado das rodas, travões e fixações. Armazenar em local seco, protegido de humidade, calor e intempéries.

Instruções de Utilização: Ajustar a altura do andarilho à estatura do utilizador. Segurar nas manoplas com ambas as mãos e empurrar o equipamento à frente, avançando de forma estável e controlada. Utilizar apenas em superfícies planas, garantindo que as quatro rodas estão em contacto com o chão. Verificar travões e estabilidade antes de cada utilização.

Imagens do Artigo:

