

MOPEDIA®

MA RP75x 05 A_PTBR_09-2021


ANDARILHO ALTO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PORTUGUÊS

SUMÁRIO

1. CÓDIGOS	PÁG.3
2. INTRODUÇÃO.....	PÁG.3
3. FINALIDADE DE USO.....	PÁG.3
4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE	PÁG.3
5. ADVERTÊNCIAS GERAIS	PÁG.4
6. SIMBOLOGIA UTILIZADA.....	PÁG.4
7. DESCRIÇÃO GERAL	PÁG.5
7.1 Ajuste de altura (RP754S-RP754A-RP758S)	pág. 5
7.2 andarilhos axilares	pág. 5
7.3 andarilhos antebraquiais	pág. 6
7.4 andarilhos antebraquiais com apoio de mesa	pág. 6
8. MONTAGEM.....	PÁG.7
8.1 andarilhos axilares e antebraquiais	pág. 7
8.2 andarilho axilar RP758S	pág. 7
8.3 andarilhos antebraquiais com apoio de mesa	pág. 8
(desmontável/dobrável RP755T - RP756T)	pág. 8
9. ANTES DE CADA USO	PÁG.9
10. ATENÇÃO AO USO	PÁG.9
11. COMO UTILIZAR.....	PÁG.9
12. MANUTENÇÃO	PÁG.9
13. LIMPEZA E desinfecção	PÁG.10
13.1 Limpeza.....	pág. 10
13.2 desinfecção	pág. 10
14. CONDIÇÕES DE DESCARTE	PÁG.10
15. PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS	PÁG.10
16. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PÁG.11
16.1 Especificações técnicas.....	pág. 11
16.2 Dimensões máximas	pág. 11
17. GARANTIA	PÁG.12
18. REPAROS.....	PÁG.12
18.1 Reparos sob garantia.....	pág. 12
18.2 Reparos de produto fora da garantia	pág. 12
18.3 Produtos sem defeito.....	pág. 13
19. REPOSIÇÃO.....	PÁG.13
20. CLÁUSULAS DE ISENÇÃO.....	PÁG.13

 Dispositivo médico Classe I
REGULAMENTO (UE) 2017/745 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 5
abril de 2017 referente aos dispositivos médicos

1. CÓDIGOS

RP755S andarilho axilar desmontável em aço pintado

RP755F andarilho axilar desmontável em aço pintado com travões

RP756S andarilho axilar dobrável em aço pintado

RP754S andarilho axilar dobrável em aço pintado com ajuste de altura

RP756A andarilho com apoio para antebraço dobrável em aço pintado

RP754A andarilho com apoio para antebraço dobrável em aço pintado com ajuste de altura

RP755T andarilho com apoio para antebraço tipo mesa desmontável em aço pintado

RP756T andarilho com apoio para antebraço tipo mesa dobrável em aço pintado

RP758S andarilho axilar dobrável em aço pintado com ajuste de altura

RP756M andarilho axilar dobrável em aço pintado modelo mini

RP756AM andarilho com apoio para antebraço dobrável em aço pintado modelo mini

2. INTRODUÇÃO

Agradecemos por escolher um andarilho da linha MOPEDIA by MORETTI S.p.A. O design e a qualidade proporcionam conforto, segurança e confiabilidade superiores. Os andarilhos MOPEDIA by MORETTI S.p.A. foram desenvolvidos para atender suas necessidades, garantindo praticidade e uso correto. Este manual traz dicas de uso do equipamento escolhido e orientações importantes para sua segurança. Recomendamos a leitura completa deste manual antes de utilizar o andarilho. Caso tenha dúvidas, entre em contato com o revendedor, que estará pronto para ajudar e aconselhar você da melhor forma.

3. FINALIDADE DE USO

Os andarilhos da linha MOPEDIA by MORETTI S.p.A. são indicados para pessoas com dificuldades de locomoção. Equipamento manuseado com ambas as mãos, projetado para apoiar e/ou facilitar a mobilidade de quem tem dificuldades ao caminhar.

ATENÇÃO!



- É proibido utilizar este dispositivo para fins diferentes dos descritos neste manual.
- A Moretti S.p.A. não se responsabiliza por danos causados pelo uso inadequado do dispositivo ou por qualquer utilização que não esteja em conformidade com este manual.
- O fabricante reserva-se o direito de realizar alterações no dispositivo e neste manual, sem aviso prévio, visando aprimorar suas características.

4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE

A MORETTI S.p.A. declara, sob sua exclusiva responsabilidade, que os produtos fabricados e comercializados pela própria empresa e pertencentes à linha andarilhos ALTOS -MOPEDIA estão em conformidade com as exigências aplicáveis do regulamento 2017/745 sobre DISPOSITIVOS MÉDICOS, de 5 de abril de 2017.

Para esse fim, a MORETTI SpA assegura e declara, sob sua exclusiva responsabilidade, o seguinte:

1. Os dispositivos em questão atendem aos requisitos gerais de segurança e desempenho conforme estipulado no Anexo I do Regulamento 2017/745, conforme indicado no Anexo IV do mesmo regulamento.
 - 2 Os dispositivos em questão NÃO SÃO instrumentos de medição.
 - 2 Os dispositivos em questão NÃO SÃO destinados a investigações clínicas.
 - 2 Os dispositivos em questão são comercializados em embalagem NÃO ESTÉRIL.
 - 2 Os dispositivos em questão devem ser considerados pertencentes à classe I, em conformidade com o Anexo VIII do referido regulamento.
2. A MORETTI SpA preserva e disponibiliza às Autoridades Competentes, por um período mínimo de 10 anos após a fabricação do último lote, a documentação técnica que comprova a conformidade com o Regulamento 2017/745.

Nota: Os códigos completos do produto, o código de registro do Fabricante (SRN), o código UDI-DI básico e possíveis referências às normas utilizadas estão descritos na Declaração de Conformidade da UE que a MORETTI SPA emite e disponibiliza pelos seus canais.









5. ADVERTÊNCIAS GERAIS



É fundamental manter atenção redobrada à presença de partes móveis, pois podem causar riscos de prender membros e provocar lesões.

- Para utilizar o dispositivo corretamente, consulte este manual, dando atenção especial à manutenção e às advertências antes de cada uso;
- Para um uso adequado do dispositivo, busque orientação com seu médico ou terapeuta;
- Mantenha o produto embalado longe de fontes de calor, pois a embalagem é feita de papelão;
- A vida útil do acessório depende do desgaste de partes que não podem ser reparadas ou substituídas;
- Fique atento à presença de crianças ao redor;
- Não ultrapasse o limite máximo de carga permitido.
- O usuário e/ou paciente deve comunicar qualquer incidente grave relacionado ao dispositivo ao fabricante e à autoridade competente do Estado Membro onde reside.

6. SIMBOLOGIA UTILIZADA

	Código do produto		Lote de fabricação
	Identificação única do dispositivo		Dispositivo médico
	Consulte o manual para orientações		Certificação CE
	Instruções para descarte		Fabricante

7. DESCRIZIONE GENERALE

Os andarilhos MOPEDIA dobráveis ou desmontáveis, axilares ou antebraquiais, são projetados para oferecer apoio a pessoas com dificuldade de locomoção. Fabricados em aço cromado e pintado, possuem quatro rodas giratórias de 100mm, sendo duas com travão, apoios ajustáveis em altura e axilares reguláveis em largura e profundidade *(Veja o modelo). As regulações de altura e largura dos apoios permitem o uso do produto por pessoas de diferentes portes: pequeno, médio ou grande. O andarilho pode ser utilizado com assento acolchoado *(RP757 Opcional). Versão com apoios axilares ou antebraquiais. Esses dispositivos facilitam a movimentação de pessoas com equilíbrio estático e/ou dinâmico limitado, aumentando a área da base de apoio. Oferecem suporte em casos de fraqueza e/ou paralisia dos membros inferiores. Auxiliam a descarregar parte do peso nos braços, quando é necessário limitar o apoio em um ou ambos os membros inferiores.

7.1 Ajuste de altura (RP754S-RP754A-RP758S)



Pressione o botão de mola e deslize a haste até alinhar com os furos, conforme a altura desejada e a necessidade de mobilidade do paciente. Recoloque o pino no furo para travar a haste e certifique-se de que está bem encaixado antes de usar o equipamento. Verifique se todas as quatro pernas estão na mesma altura. Suporta até 130 kg.

7.2 andarilhos axilares

Estrutura desmontável




RP755S



RP755F

Estrutura dobrável

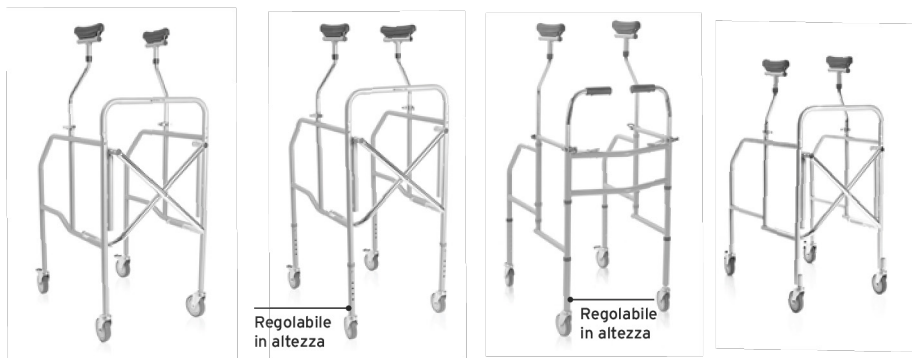

RP756S

RP754S

RP758S

RP756M

7.3 andarilhos antebraquiais

Estrutura dobrável



RP756A

RP754A

RP756AM

7.4 andarilhos antebraquiais com apoio de mesa

Estrutura desmontável



RP755T

Estrutura dobrável



RP756T

8. MONTAGEM

8.1 andarilhos axilares e antebraquiais

1. Para montar o andarilho, encaixe a barra frontal nos tubos das laterais. Você saberá que está encaixada quando ouvir o clique dos botões de trava.

2. *Dobrável - Basta abrir a estrutura **RP756S - RP754S - RP756A - RP754A - RP756M - RP756AM**

*Desmontável - Utilize as duas barras horizontais para reforçar toda a estrutura. Prenda as barras usando as quatro manoplas de rosca. **RP755S -**




Insira os apoios axilares/antebraquiais, ajustando a altura conforme desejado pelo paciente e fixe-os utilizando os dois travas presentes na estrutura.

⌀. Assento pode ser instalado e removido facilmente da estrutura graças aos quatro ganchos integrados. *(**RP757** opcional)

8.2 andarilho axilar RP758S

1. Para montar o andarilho, abra o quadro conforme mostrado na fig. (1), certificando-se de que os botões de segurança superiores na frente fig.(2) e inferiores atrás fig.(3) travem as laterais, garantindo estabilidade à estrutura. Depois, insira as duas travas de segurança no furo acima do bloqueio traseiro fig. (4)

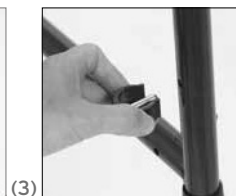

2. Coloque as quatro pernas com rodas nos encaixes correspondentes (as rodas com travão devem ficar na parte traseira), certificando-se de que os botões de segurança estejam travados.

N As quatro pernas devem sempre estar ajustadas na mesma altura. Ver fig. (5)

3. Insira as duas manoplas nos tubos de apoio correspondentes e fixe-as usando as alavancas de travamento apropriadas, conforme mostra a fig.(6).

N Caso as alavancas não consigam apertar o tubo corretamente, aperte a respectiva porca.



4. Insira os tubos de apoio dos suportes axilares pela parte mais longa nos furos adequados da fig. (7) e trave-os utilizando as alavancas de fixação.



5. Coloque os apoios axilares nos tubos de suporte, deixando-os livres para girar. fig. (8)
6. Neste ponto, o andarilho está devidamente montado e é necessário realizar os ajustes para adaptar à altura do usuário. O assento pode ser facilmente colocado e retirado da estrutura através dos quatro ganchos disponíveis (RP757 opcional).

Como dobrar o andarilho:

1. Remova o assento apenas se for opcional.
2. Retire os cliques de segurança
3. Aperte os botões de liberação (frontal na parte superior e traseiro na parte inferior) fig. (9-10) e dobre as quatro partes da estrutura sobre si mesmas fig.(11-12)



(9)



(10)




(11)



(12)

8.3 andarilhos antibraciais com apoio de mesa (desmontável/dobrável RP755T - RP756T)

1. Para montar o andarilho, encaixe a barra frontal nos tubos das estruturas laterais. A barra estará posicionada corretamente quando os botões se encaixarem.
2. *Dobrável - Basta abrir a estrutura. RP756T *Desmontável - Utilize as duas barras horizontais para reforçar toda a estrutura. Prenda as barras usando as quatro manoplas de rosca. RP755T

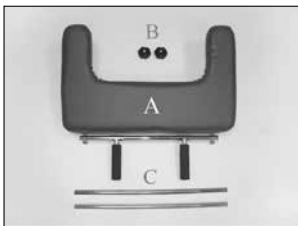

3. Insira as duas hastes (ref. C) nos tubos de suporte do andarilho posicionando-as aproximadamente na mesma altura. Depois, trave-as com as alavancas do andarilho.
4. Coloque o apoio de braços acolchoado (ref. A) sobre as hastes e ajuste a altura para que o usuário possa apoiar os antebraços formando um ângulo de aproximadamente 90°.



5. Ajuste a abertura das manoplas conforme a necessidade do usuário e fixe-as utilizando as manoplas fornecidas com o acessório (ref. B).
6. Verifique se todas as alavancas e manoplas de travamento estão devidamente apertadas.
7. Agora o apoio de braços acolchoado está montado corretamente e pronto para uso.
8. O assento pode ser facilmente colocado ou retirado da estrutura graças aos quatro ganchos que o acompanham *(RP757 opcional).

9. ANTES DE CADA USO

ATENÇÃO!



- Certifique-se sempre de que o produto está em boas condições.
- Fique atento à presença de fios elétricos no chão, piso molhado, tapetes, brinquedos ou outros obstáculos, móveis, degraus e pisos irregulares. Não utilize o andarilho para subir ou descer escadas ou escadas rolantes.
- Use com cuidado em superfícies molhadas ou escorregadias.
- Evite contato prolongado com água e verifique periodicamente a resistência do andarilho
- Para evitar riscos, recomenda-se manter o andarilho fora do alcance de crianças.

10. ADVERTÊNCIAS DE USO

Este equipamento oferece mais estabilidade, apoio e segurança ao caminhar. Porém, não deve ser utilizado por pessoas com funções visivelmente reduzidas nas mãos e/ou braços, ou por quem tem dificuldades de equilíbrio. O andarilho pode ser usado tanto em ambientes internos quanto externos. Recomenda-se o uso apenas em superfícies onde todas as quatro pernas toquem o chão. Não utilize em terrenos pedregosos ou superfícies inclinadas, pois o andarilho pode ficar instável. Este equipamento não foi projetado para transportar pessoas ou outros objetos.

- Use com cuidado em superfícies molhadas ou escorregadias.
- Não ultrapasse o peso máximo do paciente indicado na etiqueta do produto e no capítulo de características técnicas deste manual.
- Evite deixar o equipamento exposto ao tempo ou em contato com água por períodos prolongados.
- Verifique regularmente a estabilidade e resistência do produto, bem como o estado dos apoios e rodas. Substitua-os quando estiverem desgastados.
- Se tiver dúvidas sobre o uso, ajuste ou manutenção do equipamento, procure o fornecedor.
- Para evitar riscos, mantenha o equipamento fora do alcance de crianças.

11. MODO DE USO

O andarilho é um item de uso pessoal. Por isso, recomenda-se que a regulagem de altura seja feita por um profissional especializado.

Nota: Consulte as orientações de segurança deste manual. Utilize o andarilho como apoio para locomoção, segurando nas duas alças e empurrando-o à frente para caminhar com mais praticidade e segurança.

12. MANUTENÇÃO

Os produtos da linha MOPEDIA by Moretti passam por um rigoroso controle de qualidade e possuem o selo CE. Para garantir a segurança do paciente e do profissional, recomenda-se que o fabricante ou um laboratório autorizado verifique a adequação do produto pelo menos a cada 2 anos. Em caso de reparos, utilize apenas peças e acessórios originais.

- É fundamental inspecionar o andarilho antes de cada uso. Verifique especialmente se todos os parafusos e porcas estão devidamente apertados.

- Certifique-se de que o andarilho possa se mover livremente com os travões das rodas desativados.
- Verifique o funcionamento correto dos travões nas rodas traseiras.

13. LIMPEZA E DESINFEÇÃO

13.1 Limpeza

Para limpar o produto, utilize apenas um pano umedecido com água e seque com um pano limpo e seco, ou use água morna e sabão neutro.



ATENÇÃO!

Evite usar produtos abrasivos, ácidos, álcool, detergentes com cloro, desinfetantes ou acetona, pois esses produtos podem desgastar as partes de plástico e causar ferrugem nas superfícies metálicas.

O fabricante não se responsabiliza por danos causados pelo uso de materiais que possam comprometer a superfície do produto ou por produtos químicos corrosivos utilizados durante a limpeza.

13.2 Desinfecção

Quando necessário, faça a desinfecção do produto utilizando um detergente desinfetante suave.

14. CONDIÇÕES DE DESCARTE



Ao descartar o dispositivo, nunca utilize os sistemas comuns de coleta de lixo urbano. Recomenda-se realizar o descarte nas ilhas ecológicas municipais para garantir o correto reaproveitamento dos materiais utilizados.

15. PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS

Para peças de reposição e acessórios, consulte sempre o catálogo Master MORETTI.




ATENÇÃO!

Use apenas acessórios originais Moretti. Caso contrário, não nos responsabilizamos por acidentes provenientes de uso inadequado.


15.1 ACESSÓRIOS



RV7115 Barras de peso
PAR

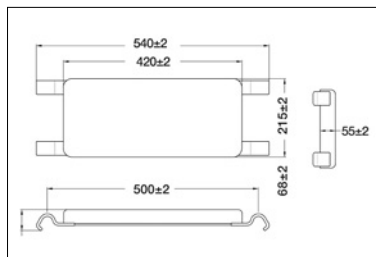

RP757
Assento acolchoado

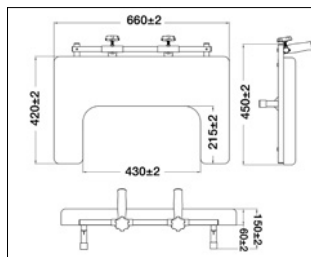


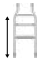






RP759/1
Mesinha acolchoada

















16. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
16.1 Detalhes técnicos

- Estrutura em aço com pintura e cromagem
- Rodízios giratórios com travão e trava de rotação Ø 10 cm (*Ver modelo)
- Rodas traseiras Ø 15,5 cm (modelo **RP755F**)
- Capacidade máxima 130 kg


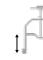





16.2 Dimensões máximas
andarrilhos axilares - Estrutura desmontável

								Espaço útil 	
RP755S	77 cm	48 cm	81,5 cm	97,5 cm	117-151 cm	55 cm	30,5-67 cm	interno 46 cm	130 kg
RP755F	81,5 cm				119-152 cm		30,5-70cm	interno 47 cm	












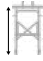


andarrilhos axilares - Estrutura dobrável

								Espaço útil 	
RP756S	79 cm	48 cm	81,5 cm	97,5 cm	117-152 cm	55 cm	30,5-67 cm	interno 46 cm	130 kg
RP754S		47-61,5 cm	82-95,5 cm	97-110,5 cm	113-127 cm				
RP756M	79 cm	-	71,5 cm	85 cm	102,5-132,5 cm	64 cm	30,5-36,5 cm	interno 46 cm	130 kg
RP758S								Espaço útil 	
	64 cm	47-61,5 cm	76-89,5 cm	80,5-94,5 cm	112-140 cm	48,5 cm	30,5-66,5 cm	interno 46 cm	130 kg

andarrilhos antibráquias - Estrutura dobrável

							Espaço útil 	
RP754A	79 cm	47-61,5 cm	82-95,5 cm	97-110,5 cm	109-159 cm	63 cm	interno 46 cm	130 kg
RP756A		48 cm	81,5 cm	97,5 cm	109-146 cm	48,5 cm		
RP756AM		-	71,5 cm	85 cm	102,5-132,5 cm	63 cm		

andarrilho antebraquial com apoio de mesa

							Espaço útil	
RP755T Desmontável	77 cm	48 cm	81,5 cm	97,5 cm	04-133 cm	66 cm	interno 46 cm mesa 42 cm	130 kg
							Espaço útil	
RP756T Dobrável	79 cm	48 cm	81,5 cm	97,5 cm	101-135 cm	66 cm	interno 46 cm mesa 42 cm	130 kg

NOTA: em alguns desenhos, o assento acolchoado RP757 aparece apenas para fins técnicos. Lembre-se que o assento RP757 é vendido separadamente como acessório.

17. GARANTIA

Todos os produtos Moretti têm garantia contra defeitos de material ou fabricação por 2 (dois) anos a partir da data de venda, exceto por possíveis exclusões e limitações especificadas abaixo. Esta garantia não se aplica em caso de uso inadequado, abuso, alterações no produto ou descumprimento das instruções de uso.

O uso correto do produto está detalhado no manual de instruções. A Moretti não se responsabiliza por danos, lesões pessoais ou quaisquer consequências decorrentes de instalação e/ou uso do equipamento fora das orientações dos manuais de instalação, montagem e uso. A Moretti não garante seus produtos contra danos ou defeitos nas seguintes situações: desastres naturais, serviços de manutenção ou reparos não autorizados, problemas com a energia elétrica (quando aplicável), uso de peças ou componentes não fornecidos pela Moretti, descumprimento das instruções de uso, modificações não autorizadas, danos de transporte (exceto o envio inicial feito pela Moretti), ou falta de manutenção conforme indicado no manual. Componentes sujeitos ao desgaste normal não são cobertos por esta garantia caso o dano seja devido ao uso regular do produto.

18. REPAROS

18.1 Reparos cobertos por garantia

Caso um produto Moretti apresente defeitos de material ou fabricação dentro do período de garantia, a Moretti avaliará junto ao cliente se o problema está coberto. A Moretti, a seu critério exclusivo, pode substituir ou reparar o item em garantia, seja em um revendedor autorizado ou em sua própria sede. Os custos de mão de obra para o reparo podem ser assumidos pela Moretti caso se confirme que a reparação está coberta pela garantia. Reparos ou substituições não renovam ou estendem o período de garantia.

18.2 Reparos de produtos fora da garantia

Produtos fora da garantia só podem ser enviados para reparo após autorização prévia do atendimento ao cliente Moretti. Os custos de mão de obra e transporte referentes ao reparo fora da garantia serão inteiramente responsabilidade do cliente ou do revendedor. Reparos realizados em produtos fora da garantia têm cobertura de 6 (seis) meses, contados a partir da data de recebimento do produto reparado.

18.3 Produtos sem defeito

O cliente será informado caso, após análise e teste de um produto devolvido, a Moretti conclua que o produto não apresenta defeito. Nesse caso, o produto será enviado de volta ao cliente, que ficará responsável pelos custos de envio referentes à devolução.

19. PEÇAS DE REPOSIÇÃO

As peças de reposição originais Moretti têm garantia de 6 (seis) meses a partir da data de recebimento da peça.

20. CLÁUSULAS DE ISENÇÃO

Exceto pelo que está expressamente previsto nesta garantia e dentro dos limites estabelecidos pela legislação, a Moretti não oferece nenhuma outra declaração, garantia ou condição, seja ela expressa ou implícita, incluindo garantias de comercialização, adequação para um propósito específico, não violação e não interferência. A Moretti não assegura que o uso do produto será contínuo ou livre de erros. O período de validade de eventuais garantias implícitas determinadas pela lei é restrito ao prazo da garantia, conforme permitido pela legislação. Alguns estados ou países podem não permitir a limitação da duração de garantias implícitas, nem a exclusão ou limitação de danos acidentais ou indiretos relacionados a produtos de consumo. Nessas regiões, certas exclusões ou limitações desta garantia podem não se aplicar ao usuário. Esta garantia pode ser alterada sem aviso prévio.

**CERTIFICADO DE GARANTIA**

Produto _____

Data da compra _____

Revendedor _____

Endereço _____ Cidade _____

Vendido para _____

Rua _____ Cidade _____

**MORETTI S.A.**

Rua Bruxelas, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

FABRICADO NA P.R.C

MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com