

MÁSCARA FACIAL Nº 4 CIRCULAR RA434

SILICONE AUTOCLAVÁVEL

Finalidade: A máscara livre de látex de silicone foi concebida para caber sobre a boca e o nariz para administrar oxigênio, é um dispositivo reutilizável e requer limpeza e esterilização antes da reutilização. Pode ser usado com todos os tipos de reanimadores manuais ou automáticos e ventiladores de pulmão.

Características: Máscara reanimadora em silicone transparente.

RA430 Neonatal - Tamanho 0

RA431 Pediátrico - Tamanho 1

RA432 Pediátrico grande - Tamanho 2

RA433 Crianças - Tamanho 3

RA434 Adultos - Tamanho 4

RA435 Adultos grande - Tamanho 5

Data de inspeção: (Quando Aplicável)

Lote: Ver embalagem

Cor: Transparente

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: RA434

Marca: Easyred

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Moretti S.p.A.

Morada do fabricante: Via Bruxelles 3 - Meleto

52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Avenida dos Combatentes N. 96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lave a máscara em água morna com um detergente suave que seja compatível com material de silicone. Enxaguar a máscara em água destilada limpa. Processo de esterilização: • A máscara pode ser descontaminada pelo método de autoclavagem padrão, ou seja, a temperatura a ser de 121° C, 10 minutos. • Seque a máscara após o processo de esterilização; • Monte a máscara no circuito respiratório ou no dispositivo de reanimação e realize um teste funcional. Se a máscara avariar, deite imediatamente fora e substitua uma nova peça.

Instruções de Utilização: Ligue a máscara ao circuito de respiração ou ao dispositivo de reanimação e use a máscara sobre o nariz e a boca. Certifique-se de que todas as ligações são compatíveis e encaixam firmemente.

Imagens do Artigo:

