

Finalidade: Confortável, leve e suave, este aparelho de massagem veste-se facilmente como um casaco e proporciona-lhe massagens diversas e variadas.

Características: Possui 4 funções de massagem com 2 níveis de intensidade: pressão, onda, normal e pulsação. Função de calor muito agradável. Você pode controlar a qualquer momento com o controle remoto multifuncional.

Lote: Ver embalagem

Cor: Preto

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 861016

Marca: Maximex

Dimensões: 38x47cm

Fabricante: Maximex GmbH & Co

Morada do fabricante: KG Bentheimer Str.
239 48529 Nordhorn service@maximex. eu

Distribuidor Europeu: Identites

Morada do Distribuidor Europeu: ZA Pôle, 49
Boulevard de la Chanterie, 49124, Saint-Barthélemy-d'Anjou, FRANÇA

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15 Zona Industrial de Rio Maior - 2040-357 Rio Maior qualidade@gerimais.com - Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: Desligue sempre a ficha da rede elétrica após cada utilização.

2. Não utilize durante o banho ou duche.
3. Não guarde o aparelho num local onde possa cair na banheira ou no lavatório.
4. Nunca o guarde perto de água nem o deixe cair sobre ela.

Instruções de Utilização:

Deve sempre ter o comando à distância na mão quando o utilizar. Utilize-o para ajustar uma intensidade que lhe seja confortável.

1. Coloque o massajador de pescoço e ombros conforme mostrado na imagem do manual de instruções.
2. Ligue o cabo do massajador à ficha de alimentação e, em seguida, ligue a ficha de alimentação à tomada.
3. Use o comando remoto para selecionar o modo de massagem, a intensidade e a posição desejadas.
4. Pode utilizar o massajador de pescoço e costas em pé, sentado ou deitado.

Imagens do Artigo:

