

**Finalidade:** Os andarilhos MOPEDIA by Moretti são auxiliares de marcha acionados com ambos os braços. Ajudam a mobilidade de pessoas com dificuldades de locomoção.

**Características:** Andador dobrável em alumínio anodizado, que pode ser usado tanto no modo fixo quanto no modo oscilante, move-se alternadamente para facilitar a locomoção, possui alças acolchoadas e ponteiros de borracha antiderrapantes, com um prático mecanismo de liberação rápida acionado por um botão. Peso máximo do utilizador 130kg.

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Preto

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva Regulamento (UE) 2017/745**

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** DB115L, DB115M

**Marca:** Mopediá, Moretti

**Dimensões:**

**DB115M** – Ajustável em altura (de 77,5 a 87,5 cm).

A: 54 cm - B: 47,5 cm - C: 52 cm

**DB115L** – Ajustável em altura (de 83,5 a 101,5cm)

A: 54 cm - B: 47,5 cm - C: 52 cm

**Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)**  
Regulamento (UE) 2017/745

**Fabricante:** Moretti S.p.A

**Morada do fabricante:** Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022  
Cavriglia (Arezzo) [www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda.

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira,  
nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior - 2040-357 Rio  
Maior [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com) Tel. 243 050 100

**Manutenção e armazenamento:** Recomenda-se a verificação periódica do dispositivo, incluindo estrutura, rodas, travões e ponteiros. Para limpeza, utilizar pano húmido com sabão neutro e secar completamente antes da utilização. Quando necessário, desinfetar com detergente desinfetante comum, não utilizando produtos ácidos, alcalinos ou solventes. Armazenar em local seco, limpo e protegido de calor, humidade e chamas abertas.

**Instruções de Utilização:** Utilizar o andarilho como apoio à marcha, segurando sempre nas pegas e deslocando-o de forma controlada à frente do utilizador. O modelo permite utilização em modo fixo ou oscilante, conforme a necessidade do utilizador. Utilizar apenas em superfícies estáveis e regulares, evitando pisos molhados, obstáculos, escadas e inclinações superiores a 10°. Verificar antes de cada utilização o estado geral do dispositivo, rodas, travões e ponteiros.

**Imagens do Artigo:**

