



MOPEDIA®

MA RS844-RS846-RS847-RS848 02 A_PT_09-2020

CADEIRAS DE BANHO E SANITÁRIA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PORTUGUÊS

ÍNDICE

1 CÓDIGOS.....	PAG.3
2. INTRODUÇÃO	PAG.3
3. UTILIZAÇÃO PREVISTA.....	PAG.3
4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE	PAG.3
5. AVISOS GERAIS	PAG.4
6. SIMBOLOGIA UTILIZADA	PAG.4
7. DESCRIÇÃO GERAL	PAG.4
7.1 Vista e lista das peças	pag. 4
8. MONTAGEM/DESMONTAGEM.....	PAG.5
8.1 Montagem RS844.....	pag. 5
8.2 Montagem RS846 - RS847	pag. 6
8.3 Montagem RS848.....	pag. 7
8.4 Desmontagem.....	pag. 7
9. ANTES DA UTILIZAÇÃO	PAG.7
10. AVISOS DE UTILIZAÇÃO	PAG.7
11. MODO DE UTILIZAÇÃO.....	PAG.8
11.1 RS844.....	pag. 8
11.2 RS846 - RS848	pag. 8
11.3 RS847	pag. 9
12. MANUTENÇÃO	PAG.9
13. LIMPEZA E DESINFEÇÃO.....	PAG.10
13.1 Limpeza	pag. 10
13.2 Desinfecção	pag. 10
14. CONDIÇÕES GERAIS DE ELIMINAÇÃO	PAG.10
15. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PAG.10
15.1 Dimensões e peso.....	pag. 10
15.2 Especificações técnicas.....	pag. 10
16. GARANTIA.....	PAG.11
17. REPARAÇÕES	PAG.11
18. PEÇAS DE REPOSIÇÃO	PAG.11
19. CLÁUSULAS DE EXONERAÇÃO	PAG.11

CE Dispositivo médico de classe I

REGULAMENTO (UE) 2017/745 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO,
de 5 de abril de 2017 relativo aos dispositivos médicos

1 CÓDIGOS

RS844 - Cadeira de banho e sanitária com 4 rodas basculante

RS846 - Cadeira de banho e sanitária com 4 rodas desmontável

RS847 - Cadeira de banho e sanitária de autopropulsão

RS848 - Cadeira de banho e sanitária com 4 rodas dobrável

2. INTRODUÇÃO

Obrigado por ter escolhido uma cadeira de banho e sanitária da linha MOPEDIA by Moretti. As cadeiras de banho e sanitárias MOPEDIA by Moretti foram concebidas e fabricadas para satisfazer todas as suas necessidades e para uma utilização prática, correta e segura. Este manual contém pequenas sugestões para uma utilização correta do dispositivo escolhido por si e conselhos preciosos para a sua segurança. Antes de utilizar a cadeira adquirida, é aconselhável ler com atenção o presente manual na íntegra. Em caso de dúvidas, queira contactar o revendedor, que o saberá ajudar e aconselhar corretamente.

NOTA: certifique-se de que nenhuma parte do produto sofreu danos durante o transporte. Em caso de danos, não utilize o produto e contacte o revendedor para obter instruções.

ATENÇÃO!



- É proibido utilizar este dispositivo para fins diferentes dos definidos no manual.
- A Moretti S.p.A. não se responsabiliza por danos resultantes do uso indevido do dispositivo ou de uma utilização diferente da indicada no presente manual.
- O fabricante reserva-se o direito de efetuar alterações no dispositivo e no seguinte manual sem aviso prévio, para melhorar as suas características.

3. UTILIZAÇÃO PREVISTA

A cadeira de banho e sanitária MOPEDIA destina-se a pessoas com dificuldades motoras. Pode ser utilizada dentro de um chuveiro como substituição da sanita e como suporte para tomar banho.

4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE

A MORETTI SpA declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que os produtos fabricados e comercializados pela MORETTI SpA e fazendo parte da família de CADEIRAS PARA BANHO estão em conformidade com as disposições aplicáveis do Regulamento 2017/745, de 5 de abril de 2017, relativo a DISPOSITIVOS MÉDICOS.

Para o efeito, a MORETTI SpA garante e declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, o seguinte:

1. Os dispositivos em objeto satisfazem os requisitos gerais de segurança e desempenho do anexo I do Regulamento 2017/745, conforme previsto no anexo IV do regulamento supracitado.
2. Os dispositivos em objeto NÃO SÃO INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO.
3. Os dispositivos em objeto NÃO SE DESTINAM A ESTUDOS CLÍNICOS.
4. Os dispositivos em objeto são comercializados em embalagens NÃO ESTÉREIS.
5. Os dispositivos em objeto devem ser considerados como pertencendo à classe I, em conformidade com as disposições do anexo VIII do regulamento supracitado.
6. A MORETTI SpA conserva e coloca à disposição das autoridades competentes, durante um prazo mínimo de 10 anos a partir da data de fabrico do último lote, a documentação técnica que comprova a conformidade com o Regulamento 2017/745.

NOTA: Os códigos completos do produto, o código de registo do fabricante (SRN), o código UDI-DI de base e eventuais referências às normas utilizadas são indicados na Declaração de Conformidade UE emitida pela MORETTI SPA e disponibilizada através dos canais apropriados.

5. AVISOS GERAIS



ATENÇÃO!

Preste sempre muita atenção à presença de peças móveis que possam causar entalamento de membros e lesões pessoais.

- Para uma utilização correta do dispositivo, consulte o com atenção o seguinte manual.
- Para uma utilização correta do dispositivo, consulte sempre o seu médico ou terapeuta.
- Mantenha o produto embalado afastado de qualquer fonte de calor, pois a embalagem é de cartão.
- A vida útil do dispositivo é determinada pelo desgaste das peças que não podem ser reparadas e/ou substituídas.
- Preste sempre muita atenção à presença de crianças.
- O utilizador e/ou o paciente deve informar o fabricante e a autoridade competente do estado-membro onde se encontra sobre qualquer acidente grave que ocorra com o dispositivo.

6. SIMBOLOGIA UTILIZADA



Código do produto



Identificador exclusivo do dispositivo



Ler o manual de instruções



Condições de eliminação



Lote de produção



Dispositivo médico



Marca CE



Fabricante

7. DESCRIÇÃO GERAL

7.1 Vista e lista das peças

RS844 Cadeira de banho e sanitária com 4 rodas basculante (fig.1)



Fig.1

1. Estrutura - 1 pç.
2. Costas com apoios de braços - 1 pç.
3. Rodas rotativas sem travão - 2 pçs.
4. Rodas rotativas com travão - 2 pçs.
5. Apoio da cabeça - 1 pç.
6. Apoios de pés - 2 pçs.
7. Assento - 1 pç.
8. Tampa do assento - 1 pç.
9. Balde sanitário - 1 pç.

RS846 Cadeira de banho e sanitária com 4 rodas desmontável (fig.2)



Fig.2

1. Estrutura lado direito - 1 pç.
2. Estrutura lado esquerdo - 1 pç.
3. Tubos de ligação - 2 pçs.
4. Costas com apoios de braços - 1 pç.
5. Apoios de pés - 2 pçs.
6. Assento - 1 pç.
7. Tampa do assento - 1 pç.
8. Balde sanitário - 1 pç.

RS847 Cadeira de banho e sanitária de autopropulsão (fig.3)



Fig.3

1. Estrutura lado direito - 1 pç.
2. Estrutura lado esquerdo - 1 pç.
3. Tubos de ligação - 2 pçs.
4. Costas com apoios de braços - 1 pç.
5. Apoios de pés - 2 pçs.
6. Assento - 1 pç.
7. Tampa do assento - 1 pç.
8. Balde sanitário - 1 pç.

RS848 Cadeira de banho e sanitária com 4 rodas dobrável (fig.4)



Fig.4

1. Estrutura dobrável - 1 pç.
2. Costas com apoios de braços - 1 pç.
3. Apoios de pés - 2 pçs.
4. Assento - 1 pç.
5. Tampa do assento - 1 pç.
6. Balde sanitário - 1 pç.

8. MONTAGEM/DESMONTAGEM

8.1 Montagem RS844

Para concluir a montagem da cadeira, efetue as seguintes operações:

- Instale as 4 rodas na estrutura utilizando o kit de parafusos e a chave fornecidos. As rodas com travão devem ser instaladas na parte posterior da estrutura (fig.5);
- Insira as costas no interior dos furos da estrutura da cadeira de rodas e fixe-as com os dois manípulos de fixação (fig.6);
- Insira o apoio da cabeça no suporte já instalado no punho de empurrar e aperte o suporte (fig.6);
- Coloque o assento na estrutura da cadeira de rodas e carregue para baixo para fixar a sua posição, de seguida, adicione a tampa (fig.7);
- Adicione os apoios de pés dos lados e rode-os para a frente até bloquearem (fig.8);
- Introduza o balde pela parte de trás da cadeira de banho, fazendo-o deslizar nas guias.

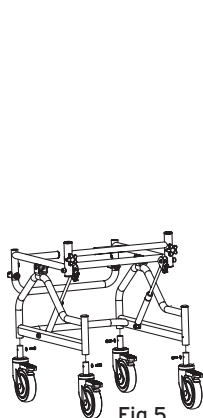


Fig.5

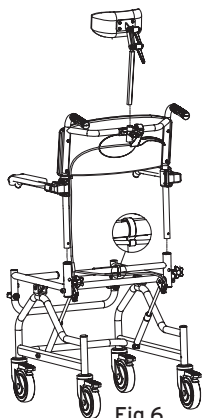


Fig.6

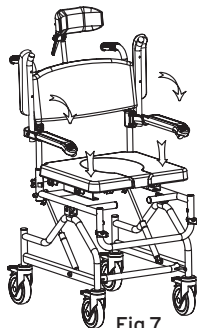


Fig.7

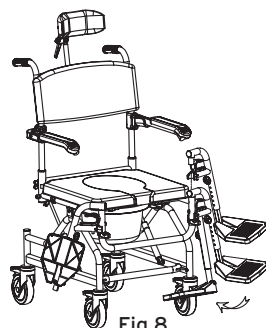


Fig.8

8.2 Montagem RS846 - RS847

Para concluir a montagem da cadeira, efetue as seguintes operações:

- Introduza os tubos de fixação na estrutura do lado esquerdo ou direito, linhe os furos e insira as molas em C, conforme ilustrado na fig.9;
- Encaixe a parte que acabou de montar no outro lado da estrutura utilizando os mesmos dois tubos de fixação e mais duas molas em C, conforme descrito no ponto anterior (fig.10);
- Insira as costas no interior dos furos da estrutura da cadeira de rodas e fixe-as com os dois manípulos de fixação (fig.11);

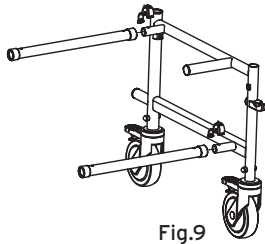


Fig.9

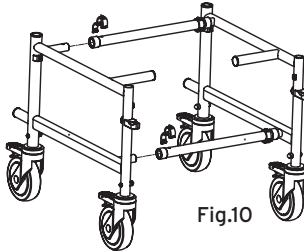


Fig.10

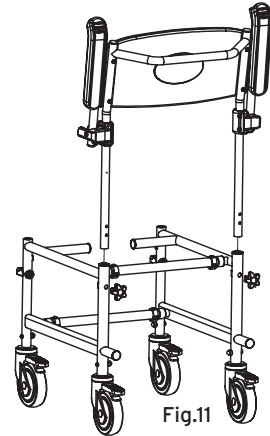


Fig.11

Imagens para fins ilustrativos

- Coloque o assento na estrutura da cadeira de rodas e carregue para baixo para fixar a sua posição, de seguida, adicione a tampa (fig.12);
- Adicione os apoios de pés dos lados e rode-os para a frente até bloquearem (fig.13);
- Introduza o balde pela parte de trás da cadeira, fazendo-o deslizar nas guias (fig.14).

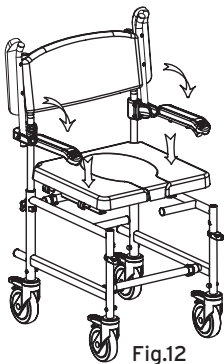


Fig.12

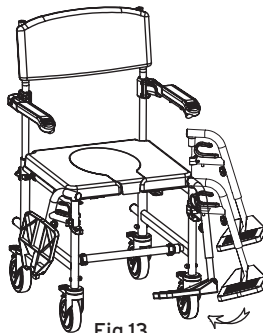


Fig.13

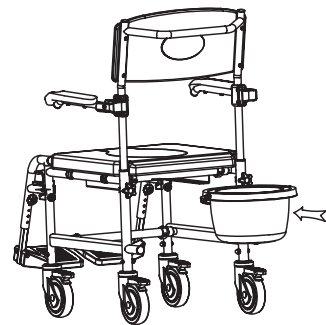


Fig.14

Imagens para fins ilustrativos

8.3 Montagem RS848

Para concluir a montagem da cadeira, efetue as seguintes operações:

- Abra a estrutura;
- Insira as costas no interior dos furos da estrutura da cadeira de rodas e fixe-as com os dois manípulos de fixação (fig.15);
- Coloque o assento na estrutura da cadeira de rodas e carregue para baixo para fixar a sua posição, de seguida, adicione a tampa (fig.16);
- Adicione os apoios de pés dos lados e rode-os para a frente até bloquearem (fig.17);
- Introduza o balde pela parte de trás da cadeira, fazendo-o deslizar nas guias (fig.18).

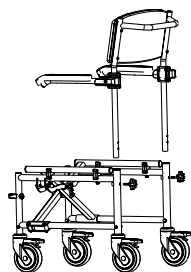


Fig.15

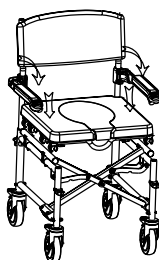


Fig.16

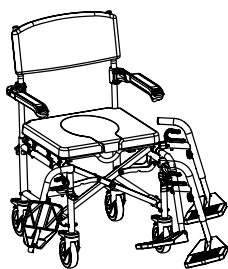


Fig.17

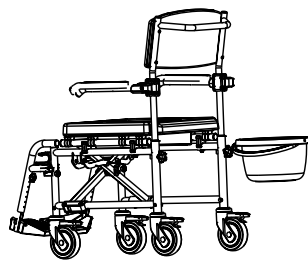


Fig.18

8.4 Desmontagem

Efetue o procedimento descrito no sentido inverso.

9. ANTES DA UTILIZAÇÃO

- Certifique-se de que as peças mecânicas não apresentam vestígios de desgaste, para garantir a utilização do dispositivo em total segurança para pessoas e objetos.
- Certifique-se da montagem correta do dispositivo, com particular atenção para a introdução correta e o bloqueio dos volantes.

10. AVISOS DE UTILIZAÇÃO

- O fabricante e o distribuidor não assumem qualquer responsabilidade por consequências decorrentes de um uso indevido do produto.
- Ajude sempre o paciente com dificuldades de locomoção a posicionar-se na cadeira.
- Não utilize com pacientes que excedam o peso máximo indicado na etiqueta do produto colocada na estrutura do auxiliar.
- Evite movimentos bruscos durante o posicionamento.
- Preste atenção a pavimentos molhados, húmidos ou escorregadios, pois podem dificultar o posicionamento do paciente.
- Não conserve o produto no exterior. Verifique periodicamente a estabilidade do produto, fixação correta dos parafusos e o estado das proteções de borracha.
- Em caso de dúvidas sobre a utilização, a regulação ou a manutenção do produto, contacte o revendedor.
- Não exceda em circunstância alguma a capacidade máxima permitida.
- Ajude sempre o paciente durante as operações de movimentação.
- Não incline a cadeira mais de 10% sem a assistência de um acompanhante.
- Trave completamente as rodas da cadeira sempre que o paciente for transferido.
- Antes de transferir o paciente da respetiva cadeira, certifique-se de que esta se encontra numa superfície plana e estável e com as rodas travadas.
- Antes de se inclinar para a frente ou de se levantar da cadeira, deve certificar-se de que as rodas dianteiras estão direitas e as traseira estão travadas, para evitar um possível capotamento.

- Para evitar um possível capotamento, não se apoie para trás excedendo as costas da cadeira.
- Durante a montagem e/ou regulação dos apoios de pés, costas e suportes das pernas ou durante a utilização da cadeira, preste a máxima atenção para evitar o esmagamento acidental dos dedos.
- Caso a cadeira seja utilizada em modo de autopropulsão, preste atenção para não introduzir acidentalmente os dedos entre os raios das rodas traseiras.
- Mantenha a cadeira afastada das fontes diretas de calor.
- Em caso de reparação, devem ser utilizadas apenas peças de reposição e acessórios originais.



ATENÇÃO! Não exceda em circunstância alguma a capacidade máxima permitida!

11. MODO DE UTILIZAÇÃO

Para empurrar a cómoda cadeira de banho e sanitária, utilize sempre e só a barra posterior, nunca empurre exercendo força nas outras partes. Antes de avançar sobre uma superfície inclinada, assegure-se das suas capacidades e limites. Aprenda as técnicas de movimento com pessoal qualificado. É pois recomendada assistência para superfícies com uma inclinação superior a 10%. Se for necessário parar numa superfície inclinada, evite movimentos bruscos. Não utilize os travões das rodas para abrandar numa descida. Não mude bruscamente de direção durante a descida. Para descer e subir escadas, solicite sempre ajuda a uma pessoa, bloqueando os travões da cadeira. Se a cadeira for levantada por duas pessoas, devem evitar pegar nela por pontos perigosos para o paciente, como os apoios de pés e os apoios de braços, utilizando apenas a estrutura e as pegas posteriores.



ATENÇÃO! Não faça pressão sobre os apoios de pés quando desce ou sobe para a cadeira.

11.1 RS844

- Sente-se distribuindo o peso por todo o assento. Não se sente apenas de um lado;
- Apoie-se sempre em ambos os apoios de braços para manter o equilíbrio;
- Em caso de utilização da cadeira por pessoas com dificuldades motoras especiais, ajude-as sempre a sentar-se e a levantar-se da cadeira.

REGULAÇÃO DOS APOIOS DE PÉS

Os apoios de pés da cadeira podem ser regulados na altura pretendida:

- Desaperte o manípulo de regulação;
- Regule o apoio de pés à altura necessária;
- Aperte bem o manípulo. Certifique-se sempre de que os dois apoios de pés estão à mesma altura.

REGULAÇÃO DO APOIO DA CABEÇA

O apoio da cabeça pode ser facilmente ajustado em várias posições. Para efetuar o ajuste, desparta uma vez os manípulos situados no apoio da cabeça e regule a respetiva posição. De seguida, aperte bem o manípulo. Repita as mesmas operações com os outros manípulos, se necessário.

REGULAÇÃO DA INCLINAÇÃO

Para inclinar a cadeira para trás, puxe a alavanca instalada no punho de empurrar e empurre para baixo.

Para repor a cadeira na posição normal, basta puxar a alavanca instalada no punho de empurrar. Os pistões hidráulicos foram concebidos para regressar à posição inicial sem que o utilizador exerça qualquer força.

11.2 RS846 - RS848

- Sente-se distribuindo o peso por todo o assento. Não se sente apenas de um lado;
- Apoie-se sempre em ambos os apoios de braços para manter o equilíbrio;
- Em caso de utilização da cadeira por pessoas com dificuldades motoras especiais, ajude-as sempre a sentar-se e a levantar-se da cadeira.

REGULAÇÃO DA ALTURA

As costas e os apoios de braços podem ser regulados juntos em duas alturas diferentes. Desparafuse e retire os manípulos que bloqueiam as costas ao assento e eleve ou baixe as costas um furo, conforme necessário. Por fim, introduza e aperte novamente os manípulos.

REGULAÇÃO DOS APOIOS DE PÉS

Os apoios de pés da cadeira podem ser regulados na altura pretendida:

- Desaperte o manípulo de regulação;
- Regule o apoio de pés à altura necessária;
- Aperte bem o manípulo. Certifique-se sempre de que os dois apoios de pés estão à mesma altura.

11.3 RS847

Para empurrar a cadeira, utilize sempre e só a barra posterior, nunca empurre exercendo força nas outras partes. Antes de avançar sobre uma superfície inclinada, assegure-se das suas capacidades e limites. Aprenda as técnicas de movimento com pessoal qualificado. É pois recomendada assistência para superfícies com uma inclinação superior a 10%. Se for necessário parar numa superfície inclinada, evite movimentos bruscos. Não utilize os travões das rodas para abrandar numa descida. Não mude bruscamente de direção durante a descida. Se a cadeira for levantada por duas pessoas, devem evitar pegar nela por pontos perigosos para o paciente, como os apoios de pés e os apoios de braços, utilizando apenas a estrutura e as pegas posteriores.



ATENÇÃO!

O paciente não deve exercer pressão nos apoios de pés para se levantar e sentar na cadeira.

TRAVÕES

A maneta do travão das rodas traseiras pode precisar de ser regulada. Neste caso, regule os travões desapertando a porca de bloqueio e faça deslizar o grampo para a frente ou para trás, conforme necessário. No fim do ajuste, aperte bem a porca de bloqueio.

SANITA

Utilize a sanita com a cadeira totalmente travada. Para utilizar a sanita, extraia a parte amovível do assento e retire o balde da parte posterior, segurando-o pela pega.

REGULAÇÃO DA ALTURA

As costas e os apoios de braços podem ser regulados juntos em duas alturas diferentes. Desparafuse e retire os manípulos que bloqueiam as costas ao assento e eleve ou baixe as costas um furo, conforme necessário. Por fim, introduza e aperte novamente os manípulos.

REGULAÇÃO DOS APOIOS DE PÉS

Os apoios de pés da cadeira podem ser regulados na altura pretendida:

- Desaperte o manípulo de regulação;
- Regule o apoio de pés à altura necessária;
- Aperte bem o manípulo. Certifique-se sempre de que os dois apoios de pés estão à mesma altura.

12. MANUTENÇÃO

A cadeira de banho e sanitária da linha MOPEDIA by MORETTI necessita de intervenções de manutenção mínimas e elementares; enumeramos de seguida os controlos que devem ser efetuados periodicamente.

- Verificação dos travões: mensalmente.
- Limpeza das peças (assento, costas, apoios de braços, rodas, etc.): consoante a necessidade.
- Lubrificação dos pernos e dos componentes de rolamento: mensalmente.

É extremamente importante que, na primeira utilização, tenham sido completamente verificadas todas as partes da cadeira de banho e sanitária, especialmente os parafusos e as porcas, para garantir que estão todos bem apertados.

13. LIMPEZA E DESINFECÇÃO

13.1 Limpeza

Para limpar o produto, utilize apenas um pano humedecido como água e seque com um pano limpo e seco, ou utilize água morna e sabão neutro.



ATENÇÃO! Não utilize substâncias abrasivas, ácidos, álcool, detergentes à base de cloro, desinfetantes e acetona, dado que estas substâncias causam a abrasão das peças de plástico e a oxidação das superfícies metálicas.

O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos causados pela utilização de materiais que possam deteriorar a superfície do produto ou por químicos corrosivos utilizados durante a limpeza.

13.2 Desinfecção

Se necessário, efetue a desinfecção do produto, utilizando um detergente desinfetante delicado. Para o assento e as costas, utilize uma esponja humedecida e sabão neutro. A sanita deve ser limpa e desinfetada regularmente, utilizando um desinfetante normal para casas de banho.










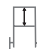




ATENÇÃO! Não utilize substâncias abrasivas, ácidos, álcool, detergentes à base de cloro, desinfetantes e acetona, dado que estas substâncias causam a abrasão das peças de plástico e a oxidação das superfícies metálicas.

14. CONDIÇÕES GERAIS DE ELIMINAÇÃO

Em caso de eliminação do dispositivo, nunca utilize os sistemas normais de eliminação de resíduos sólidos urbanos. É recomendável eliminar o dispositivo utilizando as ilhas ecológicas municipais comuns previstas para as operações de reciclagem de materiais usados.

15. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

15.1 Dimensões e peso

Dimensões* e pesos												
Medidas em cm												
RS844	98	40	102	78	54	40+55	46	49	49	17 kg	12	12
RS846	85	40	96+98	73+75	50	40+55	46	45+48	49	14 kg	12	12
RS847	101	40	96+98	73+75	50	40+55	46	45+48	51	17 kg	60	12
RS848	85	40	96+98	73+75	50	40+55	46	45+48	49	15 kg	12	12

* As medidas podem variar em +0,5 cm

15.2 Especificações técnicas

- Estrutura de alumínio pintado
- Assento, apoios de braços e costas em PU
- Apoios de braços rebatíveis
- Sanita amovível com tampa
- Capacidade máxima de 136 kg

16. GARANTIA

Todos os produtos Moretti estão garantidos contra defeitos de material ou fabrico por um período de 2 (dois) anos a partir da data de venda do produto, salvo em caso de eventuais exclusões e limitações especificadas de seguida. Esta garantia não é válida em caso de uso indevido, abuso ou alteração do produto e por não observância das instruções de utilização. A finalidade correta do produto é indicada no manual de utilização. A Moretti não se responsabiliza por danos, lesões pessoais ou outros incidentes decorrentes da instalação e/ou utilização do aparelho de forma não totalmente conforme com as instruções contidas nos manuais de instalação, montagem e utilização. A Moretti não garante os produtos Moretti contra danos ou defeitos nas seguintes situações: catástrofes naturais, operações de manutenção ou reparação não autorizadas, danos decorrentes de problemas de alimentação elétrica (se prevista), utilização de peças ou componentes não fornecidos pela Moretti, não cumprimento das diretrizes e instruções de utilização, alterações não autorizadas, danos de transporte (diferente do transporte original da Moretti) ou decorrentes da não execução da manutenção conforme indicado no manual. Não estão cobertos pela presente garantia os componentes sujeitos a desgaste se o dano for imputado a uma utilização normal do produto.

17. REPARAÇÕES

Reparação ao abrigo da garantia

Se um produto Moretti apresentar defeitos de material ou fabrico durante o período de garantia, a Moretti deve avaliar com o cliente se o defeito do produto está coberto pela garantia. A Moretti, a seu exclusivo critério, pode substituir ou reparar o artigo ao abrigo da garantia, junto de um revendedor Moretti designado ou na sua própria sede. Os custos da mão de obra relacionada com a reparação do produto podem ser suportados pela Moretti caso se determine que a reparação está abrangida pela garantia. A reparação ou substituição não implica uma renovação ou prorrogação da garantia.

Reparação de um produto não coberto pela garantia

Um produto não coberto pela garantia só pode ser devolvido para reparação após ter recebido autorização prévia do serviço de apoio ao cliente da Moretti. Os custos da mão de obra e do transporte relacionados com uma reparação não coberta pela garantia serão suportados na totalidade pelo cliente ou pelo revendedor. As reparações em produtos não cobertos pela garantia são garantidas por 6 (seis) meses a partir do dia de receção do produto reparado.

Produtos sem defeito

O cliente será avisado se, depois de ter analisado e testado um produto devolvido, a Moretti concluir que o produto não apresenta qualquer defeito. O produto será devolvido ao cliente, que terá suportar os portes da devolução.

18. PEÇAS DE REPOSIÇÃO

As peças de reposição originais da Moretti têm garantia de 6 (seis) meses a partir do dia de receção da peça.

19. CLÁUSULAS DE EXONERAÇÃO

Exceto conforme expressamente especificado na presente garantia e dentro dos limites da lei, a Moretti não oferece nenhuma declaração, garantia ou condição, expressa ou implícita, incluindo eventuais declarações, garantias ou condições de comerciabilidade, adequabilidade a um determinado fim, não violação e não interferência. A Moretti não garante que o funcionamento do produto Moretti seja ininterrupto ou sem erros. A duração de eventuais garantias implícitas que possam ser impostas por lei está limitada ao período de garantia, nos limites da legislação em vigor. Alguns estados ou países não permitem limitações à duração de uma garantia implícita ou a exclusão ou limitação de danos acidentais ou indiretos em relação a produtos para consumidores. Nesses estados ou países, algumas exclusões ou limitações desta garantia podem não se aplicar ao utilizador. A presente garantia está sujeita a alterações sem aviso prévio.

**CERTIFICADO DE GARANTIA**

Produto _____

Compra em data de _____

Revendedor _____

Rua _____ Localidade _____

Venda em _____

Rua _____ Localidade _____

**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com**MADE IN P.R.C.**

MORETTI S.P.A.
Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com