



Marquesa de massagem portátil de duas secções

Manual de Usuário - 827003.N - 827003.G



Descrição do produto

A maca de massagem profissional KinConfort foi desenvolvida para proporcionar conforto ao paciente e praticidade ao profissional durante sessões de fisioterapia, massagem e outras terapias. O seu design com laterais arredondadas permite um acesso mais fácil ao paciente, favorecendo a ergonomia durante os tratamentos.

A estrutura dobrável em madeira de alta qualidade combina robustez e facilidade de transporte, sendo adequada para utilização em clínicas, consultórios ou ao domicílio.

Características e Especificações Técnicas

- Estrutura dobrável em madeira de alta qualidade.
- Altura regulável em 11 posições.
- Laterais arredondadas para melhor acesso ao paciente.
- Orifício facial integrado.
- Encosto de cabeça removível e ajustável.
- Apoio de braços central suspenso.
- Dois apoios de braços laterais removíveis.
- Estojo de transporte incluído.
- Espuma de alta densidade (22D).
- Espessura da espuma: 6,5 cm.
- Revestimento em poliuretano impermeável.
- Superfície lavável e desinfetável.

Dimensões:

Maca (sem encosto de cabeça)

Comprimento: 185 cm

Largura: 70 cm

Altura ajustável: 63 a 88 cm (11 posições)

Encosto de Cabeça

Comprimento: 26 cm

Ajuste angular: 0° a 90° por sistema de fixação

Apoios de Braço

Apoio central suspenso: 40 x 17 cm

Apoios laterais: 37 x 11 cm (2 unidades)

Apoio para os Pés

Ajustável de 0° a aproximadamente 90°

10 posições de ajuste

Especificações Técnicas


Peso da maca: 19 kg

Capacidade máxima de carga: 220 kg

Cores disponíveis: Preto ou Cinza

Instruções e Precauções

1. Faça a manutenção da marquesa regularmente. Confirme que todos os parafusos estão bem apertados e que o cabo não está desgastado nem desfiado. Verifique também se não existem fissuras na estrutura de madeira.
2. Não exceda o limite de peso recomendado para a marquesa. Isso pode causar lesões graves ao utilizador. Este produto foi testado para suportar uma carga máxima de trabalho de 250 kg.
3. Ao limpar o vinil, não utilize produtos de limpeza à base de álcool, pois podem danificar o material. Use água morna com sabão e, no fim, seque com um pano.
4. Ao utilizar a marquesa, certifique-se de que as quatro pernas estão ao mesmo nível. Se as pernas estiverem a alturas diferentes, a marquesa pode ficar instável e provocar lesões.
5. Não permita que crianças montem ou desmontem a marquesa de massagem, exceto sob supervisão.
6. Tenha cuidado ao utilizar objetos afiados, pois podem perfurar o revestimento. Evite que a cobertura da marquesa entre em contacto com itens pontiagudos.

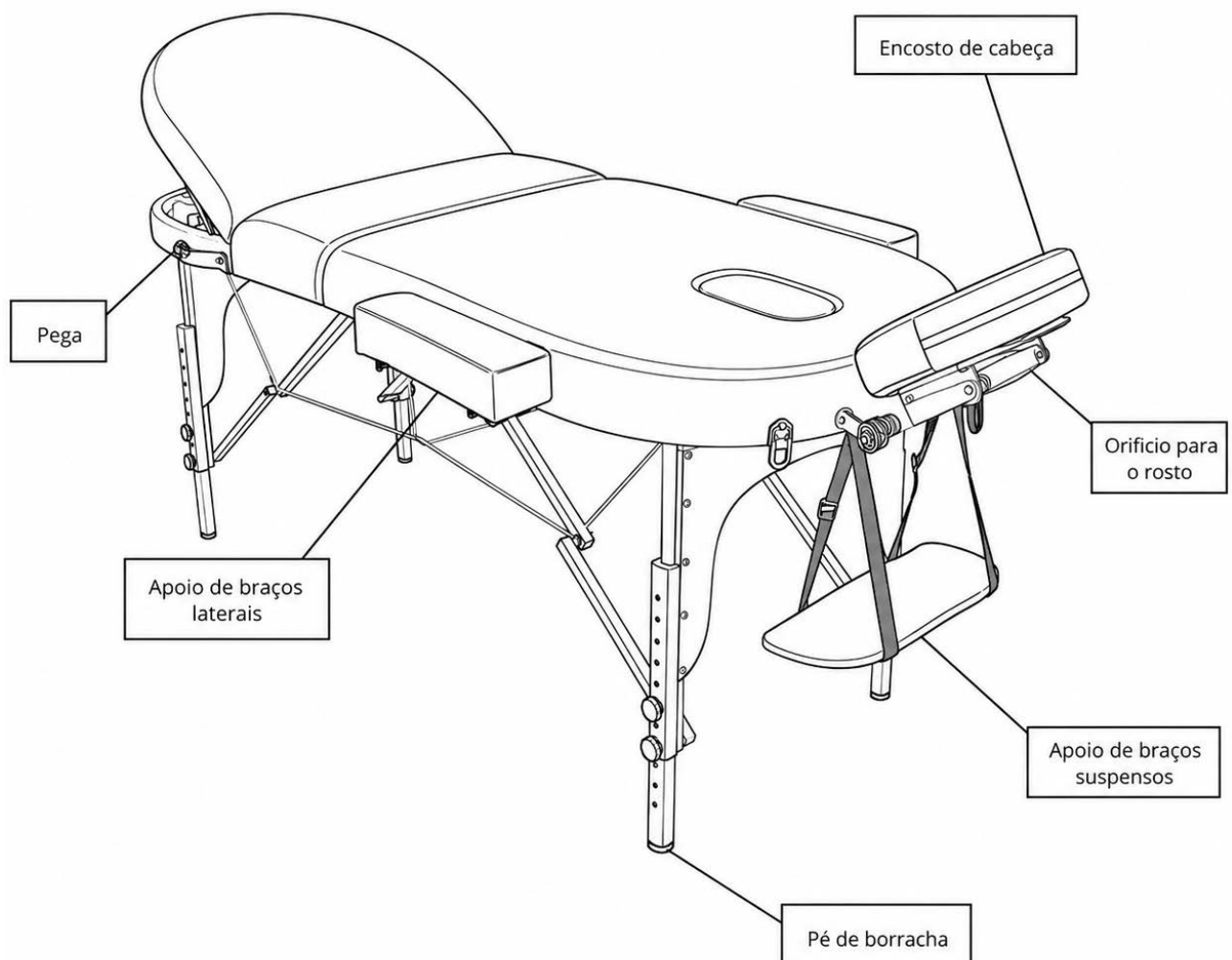

Montagem do produto

Passos a seguir:

1. Solte a fivela.
2. Deite a mesa de lado, com os quatro pés de borracha assentes no chão, e abra-a, estendendo as quatro pernas o máximo possível.
3. Retire todos os acessórios.
4. Levante a marquesa até que todas as pernas assentem no chão.
5. Encaixe os acessórios nas respetivas aberturas e coloque o apoio de braço suspenso ou a correia no suporte do encosto de cabeça.
6. Solte a pega lateral e pressione-a para dentro quando o encosto de cabeça estiver ajustado à posição pretendida.
7. A marquesa está agora pronta a utilizar.

AVISO: A altura da marquesa pode ser ajustada desapertando os botões de aperto em cada perna e retirando a extensão móvel. Para regular a altura, escolha os orifícios na extensão móvel, volte a colocá-la na perna e aperte bem os botões. Repita o mesmo procedimento, uma perna de cada vez, e certifique-se de que todas ficam à mesma altura.

Fechar e transportar a marquesa




1. Eleve o encosto ao máximo e volte a baixá-lo; feche a fivela.
2. Retire todos os acessórios.
3. Coloque a marquesa de lado, com os quatro pés de borracha assentes no chão.
4. Guarde todos os acessórios por baixo da correia elástica, sob o revestimento superior.
5. Dobre as pernas de cada extremidade para dentro, em ângulo, pressionando os respectivos braços de apoio.
6. Feche a marquesa e trave a fivela.
7. Transporte a marquesa como uma mala, segurando-a pela pega.

Aviso: Se a estrutura/ as pernas/ o conjunto da marquesa estiver danificado de alguma forma, não utilize esta marquesa. A utilização da marquesa danificada pode causar danos ou ferimentos graves a si ou ao seu paciente. Solicite a reparação de imediato.



Identidades – ZA Pole
49 Bd de la Chanterie
49124 São Bartolomeu d'ANJOU

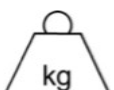

Peso máximo suportado 220 kg