

Silicoplant

Ortesis de silicona viscoelástica

Viscoelastic silicone orthoses
Orthese en silicone viscoélastique
Orthese aus viskoelastischem silikon
Ortesi in silicone viscoelastico
Ortese de silicone viscoelástica



EMO
especiallitar
en ortopedia



POD100
Almohadilla metatarsal
Metatarsal pad



MADE IN SPAIN



EMO ESPECIALIDADES MÉDICAS ORTOPÉDICAS, S.L.
Camino de La Pascualeta, 40. 46200 Paiporta (Valencia) Spain
emo@emo.es | www.emo.es | +34 963 132 051

Silicoplant
Ortesis de silicona viscoelástica

Viscoelastic silicone orthoses

POD100 Silicoplant almohadilla metatarsal

INDICACIONES: Sobrecargas metatarsales. Callosidades metatarsales

CARACTERÍSTICAS: Aro para anclaje en segundo dedo del pie, unido a almohadilla plantar. Fabricado en silicona médica extra-blanda. Forma y diseño anatómico. Cómodo de llevar. Se adapta a la temperatura corporal. Es lavable.

EFFECTOS: Amortiguación y descarga de cabezas metatarsales. Evita helomas y rozaduras.

LAVADO Y MANTENIMIENTO: Lavar con agua fría, jabón neutro y dejar secar al aire. Espolvorear ligeramente con talco. Guardar la temperatura ambiente, preferentemente en el envase de origen.

COLOCACIÓN: La correcta elección de la talla es fundamental para conseguir la máxima eficacia del tratamiento, así como prolongar la vida útil de la ortesis. Colocar la ortesis según está colocada en la imagen de la lámina de presentación.

NORMATIVA: Este producto sanitario cumple el Reglamento (EU) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre productos sanitarios y las respectivas regulaciones nacionales. Se ha realizado un Análisis de Riesgos (UNE EN ISO14971) minimizando todos los riesgos existentes. Producto sanitario Clase I, no estéril, sin función de medición.

PRECAUCIONES: Si se produce alguna reacción alérgica, irritación, alteración cutánea, hinchazón o padece cualquier tipo de sensibilización retirar el producto y consultar con el médico prescriptor o profesional sanitario. No utilizar directamente sobre cicatrices abiertas o enrojecidas sin estar debidamente protegidas. No exponer a una lámpara o fuente de calor a temperaturas muy elevadas. La ortesis tiene que quedar ajustada pero no debe comprimir en exceso.

Inspeccionar el ajuste del producto para asegurarse de que se ajusta correctamente. No apriete demasiado. Comprobar regularmente que la circulación no se vea comprometida. En caso de duda en la elección de la talla, elegir siempre la talla mayor. El usuario debe examinar regularmente el producto para que se encuentre en perfecto estado y garantizar su correcto funcionamiento. No utilice el producto si está dañado.

ADVERTENCIAS: La utilización de la ortesis está condicionada a las indicaciones. Se recomienda utilizar la ortesis por un solo paciente. Para la correcta colocación de la ortesis siga las indicaciones del fabricante. Siga las indicaciones o recomendaciones del prescriptor o del profesional sanitario. Para una adaptación personalizada, consulte a un especialista. El especialista se encargará de proporcionar la información necesaria para asegurar que el usuario final o la

persona responsable de la colocación del producto entiende cómo utilizar el producto de manera segura. Producto no apto para su esterilización. Mantener fuera del alcance de los niños. Para la eliminación del producto utilizar el contenedor de residuos sólidos. Para la eliminación del envase, dependiendo del material de éste, utilizar el contenedor del papel/cartón o el contenedor del plástico. En todo caso se debe cumplir estrictamente con la normativa del país. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente.

POD100 Silicoplant almofada metatarsal

INDICAÇÕES: Sobrecargas metatarsais. Calosidades metatarsais

CARACTERÍSTICAS: Anel de fixação no segundo dedo do pé, unido à almofada. Fabricado em silicone médico extra-macio. Forma e design anatómicos. Confortável de usar. Adapta-se à temperatura corporal. É lavável.

EFEITOS: Amortecimento e alívio das cabeças metatarsais. Evita calosidades e escoriações.

LAVAGEM E MANUTENÇÃO: Lavar com água fria, sabão neutro e deixar secar ao ar. Polvilhar ligeiramente com talco. Guardar à temperatura ambiente, de preferência na embalagem original.

COLOCAÇÃO: A escolha correta do tamanho é fundamental para obter a máxima eficácia do tratamento, bem como prolongar a vida útil da órtese. Colocar a órtese tal como está colocada na imagem da embalagem.

NORMATIVA: Este dispositivo médico cumpre o Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a produtos de saúde e às respetivas regulamentações nacionais. Foi realizada uma Análise de Riscos (UNE EN ISO 14971) minimizando todos os riscos existentes. Produto de saúde Classe I, não esterilizado, sem função de medição.

PRECAUÇÕES: Caso ocorra alguma reação alérgica, irritação, alteração cutânea, inchaço ou qualquer tipo de sensibilização, retire o produto e consulte o médico prescriptor ou profissional de saúde. Não utilize diretamente

sobre cicatrizes abertas ou vermelhas, a menos que estejam devidamente protegidas. Não exponha a fontes de calor ou a temperaturas muito elevadas. A cinta deve ficar ajustada, mas não deve comprimir em excesso. Inspeção e ajuste do produto para garantir que se ajusta corretamente. Não aperte demasiado.

Verifique regularmente se a circulação não está comprometida. Em caso de dúvida na escolha do tamanho, opte sempre pelo tamanho maior. O utilizador deve examinar regularmente o produto para se certificar de que se encontra em perfeito estado e garantir o seu correto funcionamento. Não utilize o produto se estiver danificado.

AVISOS: A utilização da órtese está condicionada às indicações. Recomenda-se que a órtese seja utilizada por um único paciente. Para a colocação correta da órtese, siga as instruções do fabricante. Siga as indicações ou recomendações do médico ou do profissional de saúde. Para uma adaptação personalizada, consulte um especialista. O especialista encarregar-se-á de fornecer a informação necessária para garantir que o utilizador final ou a pessoa responsável pela colocação do produto compreenda como utilizar o produto de forma segura. Produto não

adequado para esterilização. Manter fora do alcance das crianças. Para a eliminação do produto, utilize-o no contenedor de resíduos sólidos. Para a eliminação da embalagem, dependendo do material desta, utilize-a no contenedor de papel/cartão ou no contenedor de plástico. Em todos os casos, deve cumprir-se estritamente a legislação do país. Qualquer incidente grave relacionado com o produto deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o doente se encontram estabelecidos.

Fecha última revisión 6/2024 V.01



FABRICANTE
MANUFACTURER



CONSULTAR INSTRUCCIONES
CONSULT INSTRUCTIONS



FECHA DE FABRICACIÓN
DATE OF MANUFACTURE



LOT
CÓDIGO DE LOTE
BATCH CODE



PRODUCTO SANITARIO
MEDICAL DEVICE



REF
NÚMERO DE REFERENCIA
REFERENCE NUMBER



CADUCIDAD
EXPIRATION



CONFORMIDAD CE
CE CONFORMITY



MANTENER SECO
KEEP DRY



UN PACIENTE. MÚLTIPLES USOS.
SINGLE PATIENT. MULTIPLE USES.



RECICLADO
RECYCLED



NO CONTIENE LÁTEX
DOES NOT CONTAIN LATEX



PUNTO VERDE
GREEN POINT



MANTENER ALEJADO DE LA LUZ
KEEP AWAY FROM LIGHT

