

Finalidade: Proporcionar a imobilização e o repouso da articulação interfalângica distal, com o objetivo de aliviar a dor, proteger as estruturas lesionadas e apoiar o processo de recuperação funcional em situações de traumatismo, lesões do tendão extensor dos dedos (dedo em martelo) e no período pós-operatório após reparação cirúrgica.

Características: Fabricado em alumínio maleável, com interior acolchoado para maior conforto. Permite fácil modelagem e adaptação à posição indicada. Ajuste simples por meio das aletas laterais. Produto bilateral.

Lote: Ver embalagem

Cor:

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: IF040

Marca: EMO

Dimensões: Comprimento máximo dos dedos em cm:

T.S (6.3)

T.M (7.1)

T.L (7.7)

Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)
Regulamento (UE) 2017/745

Fabricante: ESPECIALIDADES MEDICO ORTOPEDICAS,
S.L

Morada do fabricante: Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) España

www.emo.es

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira,
nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior 2040-357 Rio
Maior - geral@gerimais.com Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: Não expor a chama direta ou fontes de calor em temperaturas elevadas. Armazenar em temperatura ambiente. Manter, preferencialmente, na embalagem original.

Instruções de Utilização: Cubra a área palmar do dedo afectado, ajustando a tala com uma dupla curvatura, fechando as abas laterais sobre as falanges média e proximal. A tala pode ser cortada com uma tesoura, devendo posteriormente alisar as extremidades para evitar bordos afiados. A flexão repetida do alumínio pode provocar a sua ruptura.

Imagens do Artigo:

