

Finalidade:

Cinto abdutor acolchoado para cadeira. Oferece soluções para pessoas com problemas de instabilidade provocada por funções físicas ou psicológicas ou deficiências psíquicas funcionais.

Características:

Acolchoamento: 20% anteline (100% poliéster), 20% de veludo (100% poliamida) e 60% de espuma.

Cintas: 100% polipropileno.

Medida: Universal

Lote: Ver embalagem

Cor: Azul

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 307100

Marca: UBIO

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante:

C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº15, Zona Industrial de Rio Maior, 2040-357 Rio Maior - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lavar regularmente à mão ou à máquina a uma temperatura máxima de 40°C. Secar na horizontal sem fontes de calor. Não usar lixívia.

Instruções de Utilização:

Evita que o paciente se curve, escorregue ou tenha uma má postura. Fornece um apoio firme e confortável na área do raptor com uma fechadura de segurança nas costas para evitar que o paciente a abra pela de volta para evitar que o paciente o abra por o paciente a abrir por si próprio.

Imagens do Artigo: