

P/ CADEIRA COM ALÇAS

Finalidade: O cinto pélvico para cadeirão com alças, oferece soluções para problemas de instabilidade provocada por funções físicas ou psicológicas ou psicológica. Impede o doente de se inclinar, escorregando ou sofrendo de má postura. Proporciona uma firme e confortável com presilhas nas costas para evitar que o paciente abra sozinho.

Características: Acolchoamento: 20% poliéster, 20% de veludo (poliamida) e 60% de espuma.

- Respirável: 100% poliéster; Cintas: 100% polipropileno. Fecha com presilhas.

Lote: Ver embalagem

Cor: Azul e preto

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 305010

Marca: UBIO

Dimensões:

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante:

C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lavar regularmente à mão ou à máquina a uma temperatura máxima de 40°C. Secar na horizontal sem fontes de calor. Não usar lixívia.

Instruções de Utilização:

Para o correto posicionamento deste artigo, o paciente deve ser posicionado confortavelmente na cadeira e o cinto deve ser passado Impede o paciente de se dobrar escorregamento, deslizamento ou má postura. Fornece um apoio firme e confortável no abdómen com um fecho de segurança nas costas para evitar para o paciente abra sozinho.

Imagens do Artigo:

