

Finalidade:

A forma anatómica da almofada amortece e protege a área do Hallux Valgus e do ante pé. Desenhado de forma a poder adaptar-se a qualquer tipo de calçado, fabricado em gel com uma almofada de compressão média que proporciona um alívio imediato da pressão.

Características:

Almofada em gel polímero viscoelástico não tóxico, hipoalérgico e dermatologicamente testado evitando o crescimento bacteriano. 100% polímero de gel. Tecido elástico: 83% nylon, 17% lycra.

Lote: Ver embalagem

Cor: Pele

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 802210 - S; 802215 - L

Marca: UBIO

Dimensões: S e L

Diretiva: CE 93/42/EEC

Classificação: Classe I

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante: C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lavar com água fria e um detergente neutro e deixar secar ao ar. Evitar o uso de produtos e materiais abrasivos, cortante e pontiagudos. Deixe secar completamente antes de voltar a utilizá-lo. Polvilhe talco se o gel começar a ficar pegajoso. Não expor a fontes diretas de calor.

Instruções de Utilização:

Colocar o protector na zona proeminente do Hallux e introduzindo o anel do protetor no primeiro dedo como fixação.

Imagens do Artigo: