

**Finalidade:**

Proteção contra calosidades, bolhas e dedos em garra ou martelo. O produto não ocupa espaço no interior do calçado.

**Características:**

Exterior – 70% nylon, 30% Lycra elástica. Interior – Tubo de 15 cm em gel polímero viscoelástico não tóxico, hipoalérgico e dermatologicamente testado evitando o crescimento bacteriano.

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Cor pele

**Data de produção:** Ver embalagem

**Modelo:** 805185 – S; 805190 – L

**Marca:** UBIO

**Dimensões:** Tamanhos - S; L

**Diretiva:** CE 93/42/EEC

**Classificação:** Classe I

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** UBIOTEX España S.L.

**Morada do fabricante:** C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:**

Lavar com água fria e um detergente neutro e deixar secar ao ar. Evitar o uso de produtos e materiais abrasivos, cortante e pontiagudos. Deixe secar completamente antes de voltar a utilizá-lo. Polvilhe talco no interior se o gel começar a ficar pegajoso. Não passar a ferro. Não expor a fontes diretas de calor.

**Instruções de Utilização:**

Traumatismos, unhas encarnadas dedos em martelo. Hidrata, suaviza, protege e amortece a zona de contacto. Contribui para aliviar a pressão e fricção nos dedos. Patologia: Dedos em martelo, dedos sobrepostos. Lesões e dedos parcialmente amputados. Problemas cutâneos ou unhas encravadas.

Escolher o tamanho adequado a fim de não apertar demasiado o dedo. Cortar o pedaço de tubo adequado e colocar no dedo a proteger.

**Imagens do Artigo:**