

**Finalidade:** O colete pélvico com cinto pélvico para cadeirão com, oferece soluções para problemas de instabilidade provocada por funções físicas ou psicológicas ou psicológica. Impede o doente de se inclinar, escorregando ou sofrendo de má postura. Proporciona uma firme e confortável com presilhas nas costa para evitar que o paciente abra sozinho.

**Características:** Acolchoamento: 20% camurça (100% poliéster), 20% aveludado (100% poliamida) e 60% aveludado (100% poliamida)

Tecido respirável: 100% poliéster

Cintas 100% polipropileno

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Azul e preto

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** 305615 – S  
305014 – M  
305013 - L

**Marca:** UBIO

**Dimensões:**

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** UBIOTEX España S.L.

**Morada do fabricante:**

C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Avenida dos Combatentes N. 96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:**

Lavar regularmente à mão ou à máquina a uma temperatura máxima de 40°C. Secar na horizontal sem fontes de calor. Não usar lixívia.

### Instruções de Utilização:

Para o correto posicionamento deste artigo, o paciente deve ser posicionado confortavelmente na cadeira e o cinto deve ser passado Impede o paciente de se dobrar escorregamento, deslizamento ou má postura. Fornece um apoio firme e confortável no abdómen com um fecho de segurança nas costas para evitar para o paciente abra sozinho.

### Imagens do Artigo:

