

Finalidade: A Breezy 90 é a alternativa mais económica da gama Breezy. Simples e funcional, com tudo o necessário para cobrir as necessidades de usuários esporádicos ou ocasionais de cadeiras de rodas, tanto dentro como fora de casa.

Características: Comprimento da perna ajustável com bloqueio por via de parafuso. Protetor lateral. Estrutura de aço dobrável, tecido do assento de nylon com tela dupla; tecido do encosto de nylon com bolso traseiro. Cor da armação: azul. Peso da cadeira: 17,65kg

Peso máximo de carga: 125 kg

Dimensões: Largura do assento: 42cm; Profundidade do assento: 40cm; Comprimento da perna: 37 a 46cm(ajustável); Altura do encosto: 44cm; Altura do assento: 50cm; Altura total: 91,5 cm; Largura total: 58 cm;

Cor: Preto/Azul

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: Breezy 90 – 42 cm

Marca: UBIO Qualitylife

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Sunrise Medical

Morada do fabricante: D-69254 Malsch / Heidelberg

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Avenida dos Combatentes N.º96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Manter a cadeira limpa e tratada com desinfetante, em todas as superfícies que entrem em contacto com o utilizador. Utilize um líquido para desinfeção alcoólica. Mantenha a cadeira num local seco.

Instruções de Utilização: Nunca exceda a carga máxima indicada de 125kg entre utilizador e objetos transportados na cadeira. Se estiver escuro utilize roupa clara e com refletores.

Quando se sentar ou sair da cadeira de rodas, não se apoie nos apoios de pés. Deve dobrá-los para cima antes e movê-los para o exterior tanto quanto possível. Posicione-se sempre tão próximo quanto possível do local para onde se pretende transferir.

Imagens do Artigo:

