

Finalidade:

Andarilho com 2 rodas é um auxiliar de mobilidade serve para facilitar a mobilidade de alguém com dificuldade em andar. O andarilho proporciona estabilidade, suporte e segurança durante a deambulação.

Características:

Andarilho dobrável com assento. Quadro em aço. Pega e assento – polipropileno; 2 Rodas – E.V.A. Peso máximo de carga: 136 Kg

Peso: 8,9 Kg

Dimensões: 59 x 51 x 73,5 a 94 cm

Data de inspeção: (Quando Aplicável)

Lote: Ver embalagem

Cor: Azul e preto

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: RP682

Marca: Mopedia

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Moretti S.p.A.

Morada do fabricante: Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão
Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-
357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Limpar apenas com um pano molhado e seque-o com um pano limpo e seco. Utilizar sabão neutro que não danifique os materiais. Não utilizar escovas metálicas ou objetos abrasivos ou afiados. Lubrificar as rodas periodicamente.

Instruções de Utilização:

Não pode ser utilizado em solo rochoso ou em área inclinada e não se destina a transportar pessoas ou coisas.

Antes de sentar: Coloque o andarilho sobre uma superfície plana e sólida. Antes de empurrar, certifique-se que está numa posição vertical e tem ambas as mãos nas pegas.

Imagens do Artigo: