



MOPEDIA®

MA RP719_RP720_RP722_RP723_RP726 02 A_PT_09 2020

PIRÂMIDES TRIPÉ E QUADRIPE

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PORTUGUÊS

ÍNDICE

1. CÓDIGOS.....	PAG.3
1.1 Códigos das pirâmides tripé.....	pag. 3
1.2 Códigos das pirâmides quadripé.....	pag. 3
2. INTRODUÇÃO	PAG.3
3. UTILIZAÇÃO PREVISTA	PAG.3
4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE	PAG.3
5. ADVERTÊNCIAS GERAIS	PAG.4
6. SIMBOLOGIA UTILIZADA	PAG.4
7. DESCRIÇÃO GERAL	PAG.4
7.1 Regulação da altura	pag. 4
7.2 Adaptação para utilização em mão direita/esquerda	pag. 4
8. ANTES DE QUALQUER UTILIZAÇÃO.....	PAG.5
9. ADVERTÊNCIAS DE UTILIZAÇÃO	PAG.5
10. MODO DE UTILIZAÇÃO.....	PAG.5
11. MANUTENÇÃO	PAG.5
12. LIMPEZA E DESINFEÇÃO	PAG.5
12.1 Limpeza	pag. 5
12.2 Desinfecção	pag. 5
13. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO	PAG.5
14. CARATERÍSTICAS TÉCNICAS.....	PAG.6
14.1 Pirâmides tripé.....	pag. 6
14.2 Pirâmides quadripé.....	pag. 6
15. PEÇAS SOBRESSELENTES.....	PAG.6
16. GARANTIA	PAG.7
16.1 Reparação	pag. 7
16.2 Peças sobresselentes.....	pag. 7
16.3 Cláusulas de não responsabilidade.....	pag. 7

CE Dispositivo médico de classe I

Decreto legislativo italiano n.º 46 de 24/02/97 (Decreto-Lei n.º 145/2009 de 17 de junho) que transpõe a diretiva CEE 93/42 e suas alterações posteriores

1. CÓDIGOS

1.1 Códigos das pirâmides tripé

- RP719** Pirâmide tripé de alumínio anodizado regulável em altura apoio braquial
RP720 Pirâmide tripé de alumínio anodizado regulável em altura pega aberta

1.2 Códigos das pirâmides quadripé

- RP722** Pirâmide quadripé de alumínio anodizado base ampla apoio braquial
RP723 Pirâmide quadripé de alumínio anodizado base ampla pega aberta
RP726 Pirâmide quadripé de alumínio anodizado base estreita (15x20 cm) e pega aberta

2. INTRODUÇÃO

Obrigado por ter escolhido um auxiliar da linha MOPEDIA by Moretti. As pirâmides tripé e quadripé Moretti foram concebidas e produzidas para satisfazer todas as suas exigências, para uma utilização prática, correta e segura. Este manual inclui pequenas sugestões sobre como utilizar corretamente o dispositivo que escolheu e oferece recomendações preciosas para a sua segurança pessoal. Recomenda-se a leitura atenta e integral deste manual de instruções, antes de utilizar o dispositivo. Em caso de dúvida, agradecemos que contacte o revendedor, que poderá ajudá-lo e aconselhá-lo corretamente.

3. UTILIZAÇÃO PREVISTA

As pirâmides tripé e quadripé Moretti são auxiliares manipulados por um braço, que servem para amparar e/ou ajudar a mobilidade das pessoas com dificuldade de locomoção.

ATENÇÃO!



- É proibido utilizar o dispositivo para finalidades diferentes das previstas neste manual. A Moretti S.p.A. declina qualquer responsabilidade por danos causados pela utilização indevida do dispositivo ou de modo não previsto neste manual de instruções
- O fabricante reserva-se o direito de fazer alterações no dispositivo e neste manual de instruções sem aviso prévio, a fim de melhorar as suas características

4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE

A MORETTI SpA declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que os produtos fabricados e comercializados pela MORETTI SpA e fazendo parte da família de TRIPÉ E QUADRIPÉ estão em conformidade com as disposições aplicáveis do Regulamento 2017/745, de 5 de abril de 2017, relativo a DISPOSITIVOS MÉDICOS.

Para o efeito, a MORETTI SpA garante e declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, o seguinte:

1. Os dispositivos em objeto satisfazem os requisitos gerais de segurança e desempenho do anexo I do Regulamento 2017/745, conforme previsto no anexo IV do regulamento supracitado.
2. Os dispositivos em objeto NÃO SÃO INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO.
3. Os dispositivos em objeto NÃO SE DESTINAM A ESTUDOS CLÍNICOS.
4. Os dispositivos em objeto são comercializados em embalagens NÃO ESTÉREIS.
5. Os dispositivos em objeto devem ser considerados como pertencendo à classe I, em conformidade com as disposições do anexo VIII do regulamento supracitado.
6. A MORETTI SpA conserva e coloca à disposição das autoridades competentes, durante um prazo mínimo de 10 anos a partir da data de fabrico do último lote, a documentação técnica que comprova a conformidade com o Regulamento 2017/745.

Nota: Os códigos completos do produto, o código de registo do fabricante (SRN), o código UDI-DI de base e eventuais referências às normas utilizadas são indicados na Declaração de Conformidade UE emitida pela MORETTI SPA e disponibilizada através dos canais apropriados.

5. ADVERTÊNCIAS GERAIS

- Para que o dispositivo seja utilizado de maneira correta, siga as instruções deste manual
- Para o uso correto do dispositivo, consulte sempre o seu médico ou terapeuta
- Certifique-se de que o produto lhe é entregue íntegro e conserve-o embalado, longe de fontes de calor
- A vida útil do dispositivo é determinada pelo desgaste das peças não suscetíveis de reparação e/ou não substituíveis
- Preste particular atenção quando houver crianças
- O utilizador e/ou o paciente deve informar o fabricante e a autoridade competente do estado-membro onde se encontra sobre qualquer acidente grave que ocorra com o dispositivo.

6. SIMBOLOGIA UTILIZADA

	Código do produto
	Identificador exclusivo do dispositivo
	Marca CE
	Fabricante
	Lote de produção
	Ler o manual de instrução
	Dispositivo médico
	Condições de eliminação

7. DESCRIÇÃO GERAL

As pirâmides tripé e quadripé MOPEDIA são de alumínio anodizado, incluem uma pega anatómica e ponteiros de borracha antiderrapante. Podem ser reguladas em altura, de 2,5 em 2,5 cm. Estes dispositivos ajudam a pessoa a manter a posição quando está imóvel em pé e durante a locomoção. Oferecem estabilidade em termos de equilíbrio e amparam quando há problemas de força. O peso máximo de utilizador é 130 kg, modelo para adulto (para RP719 e RP722 o peso máximo de utilizador é 100 kg).

7.1 Regulação da altura



Prima o botão de mola (pino retentor) e deslize com a haste da pirâmide até encontrar a posição do furo que lhe permita obter a altura desejada com base na mobilidade subjetiva do paciente. Encaixe de novo o pino retentor no furo escolhido, para fixar de novo a posição da haste da pirâmide tendo o cuidado de, antes de utilizar o dispositivo, se certificar de que o pino está bem encaixado.

7.2 Adaptação para utilização em mão direita/esquerda

Carregue no pino retentor e rode a haste de 180°. Certifique-se de que o pino está completamente encaixado no furo.

8. ANTES DE QUALQUER UTILIZAÇÃO

- Verifique sempre o estado de desgaste e de funcionamento das partes componentes, de forma a garantir a segurança total das pessoas e objetos durante a utilização do dispositivo
- Verifique a correta introdução do pino retentor no furo, bem como a montagem do dispositivo

9. ADVERTÊNCIAS DE UTILIZAÇÃO

- Em superfícies molhadas e escorregadias, utilize com prudência
- Não ultrapasse o peso máximo de utilizador indicado no rótulo do produto e no capítulo Características técnicas deste manual
- Evite deixar o dispositivo no exterior e em contacto com água durante um longo período de tempo
- Verifique periodicamente a estabilidade e robustez do produto e o estado das ponteiras de borracha. Substitua-as quando estiverem gastas
- Se tiver dúvidas sobre a utilização, regulação ou sobre a manutenção do produto, contacte o revendedor
- Para evitar riscos, mantenha o dispositivo fora do alcance das crianças

10. MODO DE UTILIZAÇÃO

Aferre o dispositivo com a mão oposta ao da perna debilitada e com o lado mais amplo da base de apoio virado para dentro. Avance a pirâmide ao mesmo tempo que avança com a perna debilitada, carregando todo o peso sobre a perna mais forte. Durante a locomoção, tenha o cuidado de não apoiar o dispositivo muito perto do corpo, para evitar tropeçar numa das ponteiras nem muito afastado, para evitar desequilibrar-se. No caso de utilização de escadas, verifique se o tamanho dos degraus é suficiente para a base do auxiliar. Em caso afirmativo, avance primeiro a perna mais forte, depois o dispositivo e, por último, a perna mais debilitada. Para descer as escadas, deve avançar o dispositivo, a perna doente e por último a perna sã. Se for necessário, deixe-se ajudar por um assistente.

11. MANUTENÇÃO

Os dispositivos da linha MOPEDIA by Moretti, na altura da sua colocação no mercado, são cuidadosamente examinados e marcados com a marca CE. Para a segurança do paciente e do médico, recomenda-se mandar controlar a aptidão ao uso do seu produto ao fabricante ou a um laboratório autorizado, pelo menos de dois em dois anos. Em caso de reparação devem ser utilizados unicamente peças e acessórios originais.

12. LIMPEZA E DESINFEÇÃO

12.1 Limpeza

Para limpar o produto utilize, exclusivamente, um pano embebido em água e seque com um pano limpo e seco ou utilize água morna e sabão neutro.

ATENÇÃO!



Não utilize substâncias abrasivas, ácidos, álcool, detergentes à base de cloro, desinfetantes e acetona, porque provocam a abrasão dos componentes de plástico e criam ferrugem nas superfícies metálicas

O fabricante não será responsável por danos causados durante a limpeza, devido à utilização de materiais que possam deteriorar a superfície do produto ou corrosivos químicos.

12.2 Desinfecção

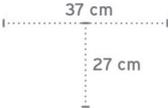
Se for necessário, desinfete o produto utilizando um detergente desinfetante suave.

13. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO

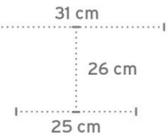
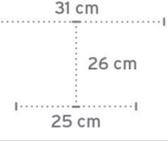
Em caso de eliminação do dispositivo, nunca utilizar os sistemas normais de eliminação de resíduos sólidos urbanos. Em contrapartida, recomenda-se eliminar o dispositivo através das ilhas ecológicas municipais normais, próprias para a reciclagem prevista dos materiais utilizados.

14. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

14.1 Pirâmides tripé

Códigos	Peso máx.	Altura regulável	Pega	Base
RP719	100 kg	76 a 98 cm	Pega de apoio braquial	
RP720	130 kg	75 a 97 cm	Pega aberta de esponja	

14.2 Pirâmides quadripé

Códigos	Peso máx.	Altura regulável	Pega	Base
RP722	100 kg	76 a 98 cm	Pega de apoio braquial	
RP723	130 kg	75 a 95 cm	Pega aberta anatômica	
RP726	130 kg	75 a 95 cm	Pega aberta anatômica	

15. PEÇAS SOBRESSELENTES

RV7036 (4pz)



Ponteiras de borracha macia para pirâmide quadripé base estreita Ø14mm (RP726)

RV7033 (2pz)



Ponteiras de borracha macia para pirâmides tripé e quadripé base larga Ø18mm (RP72x)

16. GARANTIA

Salvo as eventuais exclusões e restrições especificadas a seguir, todos os produtos Moretti beneficiam de 2 (dois) anos de garantia contra defeitos de material ou de fabrico, contados a partir da data de venda do produto. Esta garantia não é válida no caso de utilização imprópria, abuso ou alteração do produto e também no caso de desrespeito das instruções de utilização. A utilização prevista do produto está indicada no manual de utilização. A Moretti não é responsável por danos decorrentes de lesões corporais ou por quaisquer outros danos causados ou imputáveis a montagem e/ou utilização não rigorosamente conformes as instruções incluídas nos manuais de instalação, montagem e utilização. A Moretti não garante os seus produtos contra danos ou defeitos nas seguintes condições: catástrofes naturais, serviços de manutenção ou reparação não autorizados, danos causados por problemas de alimentação de energia (onde prevista), utilização de peças ou componentes não fornecidos pela Moretti, desrespeito das orientações gerais e instruções de utilização, alterações não autorizadas, danos de transporte (outros modos de transporte diferentes do original da Moretti) ou, ainda, pela não realização de manutenção como indicado no manual. Não estão cobertos por esta garantia os componentes sujeitos a desgaste, se o dano for atribuível à utilização normal do produto.

16.1 Reparação

Reparação ao abrigo da garantia No caso de um produto Moretti apresentar defeitos de material ou de fabrico durante o prazo de garantia, a Moretti avaliará com o cliente se a garantia cobre o defeito do produto. A Moretti, à sua incontestável discricção, pode substituir ou reparar o artigo sob garantia junto de um revendedor Moretti especificado ou na sua sede. O custo de mão de obra relativo à reparação do produto pode ser da responsabilidade da Moretti, se for determinado que a reparação é abrangida pela garantia. Uma reparação ou substituição não renova nem prolonga a garantia.

Reparação de um produto não coberto pela garantia: Um produto não coberto por garantia poderá ser devolvido para reparação somente após autorização prévia do serviço de apoio aos clientes da Moretti. Os custos de mão de obra e de porte relativos a uma reparação não coberta por garantia serão totalmente suportados pelo cliente ou pelo revendedor. As reparações em produtos não cobertos por garantia têm uma garantia de 6 (seis) meses a contar da data de receção do produto reparado.

Produtos não defeituosos O cliente será avisado se, após examinado e ensaiado o produto devolvido, a Moretti concluir que não é defeituoso. O produto será, então, restituído ao cliente, ao qual compete suportar as despesas de porte para a restituição.

16.2 Peças sobresselentes

As peças sobresselentes originais Moretti têm garantia de 6 (seis) meses a contar da data em que forem recebidas.

16.3 Cláusulas de não responsabilidade

Sem prejuízo das disposições expressas nesta garantia e dentro dos limites da lei, a Moretti não oferece nenhuma outra declaração, garantia ou condição, expressa ou implícita, incluindo eventuais declarações, garantias ou condições de comerciabilidade, aptidão para um fim específico, não violação e não interferência. A Moretti não garante que a utilização do produto Moretti será ininterrupta ou sem erros. A duração de eventuais garantias implícitas que possam ser aplicadas pelas normas de lei é limitada ao período de garantia, nos limites das normas de lei. Alguns estados ou países não permitem restrições relativas ao período de duração de uma garantia implícita ou a exclusão ou limitação de danos acidentais ou indiretos em relação a produtos para o consumidor. Nestes estados ou países, algumas exclusões ou limitações desta garantia poderão não ser aplicáveis ao utilizador. Esta garantia está sujeita a variações sem aviso prévio.

**CERTIFICADO DE GARANTIA**

Produto _____

Compra em data de _____

Revendedor _____

Rua _____ Localidade _____

Venda em _____

Rua _____ Localidade _____



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.

MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com