

Finalidade:

Especialmente adequado para dedos encavalitados ou desalinhados. Mantém o alinhamento durante a cicatrização e pós-operatório para uso prolongado.

Características:

100% gel polímero

Gel polímero viscoelástico não tóxico, hipoalérgico e dermatologicamente testado evitando o crescimento bacteriano.

Lote: Ver embalagem

Cor: Branco

Data de produção: Ver embalagem

Modelo:

805145 – S; 805150 – M; 805155 – L

Marca: UBIO

Dimensões: Tamanhos - S; M, L

Diretiva: CE 93/42/EEC

Classificação: Classe I

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante: C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Enxaguar com água fria, sabão e secar ao ar. Não expor a fontes de calor direto. Depois de seco polvilhar ligeiramente com pó talco sem perfume.

Instruções de Utilização:

Protege os dedos no caso de calos e fricções interdigitais, diminuindo a fricção e a dor. Ajuda no alinhamento de dedos por problemas de unhas encravadas ou no pós-operatório. Graças à sua densidade especial e aos óleos minerais de grau medicinal protege a área afetada.

Escolher o tamanho adequado. Colocar o separador entre os dedos a proteger ou alinhar. A parte saliente do separador deve estar para cima.

Imagens do Artigo: