

Finalidade:

Protege os dedos no caso de calos e fricções interdigitais, diminuindo a fricção e a dor. Ajuda alinhamento de dedos por problemas nas articulações metatársico falângicas causadas por Hallux Valgus.

Características:

Gel polímero viscoelástico não tóxico, hipoalérgico e dermatologicamente testado evitando assim o crescimento bacteriano.

Lote: Ver embalagem

Cor: Branco

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 805130 – S; 805135 – M; 805140 – L

Marca: UBIO

Dimensões: Tamanhos - S; M ; L

Diretiva: CE 93/42/EEC

Classificação: Classe I

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante: C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lavar com água fria e um detergente neutro e deixar secar ao ar. Evitar o uso de produtos e materiais abrasivos, cortante e pontiagudos. Deixe secar completamente antes de voltar a utilizá-lo. Polvilhe talco se o gel começar a ficar pegajoso. Não expor a fontes diretas de calor.

Instruções de Utilização:

Hidrata, suaviza, protege e amortece a zona de contacto. Contribui para aliviar a pressão e fricção nos dedos. Patologia: Calos e fricções interdigitais

Escolher o tamanho adequado a fim de não apertar demasiado o dedo. Cortar o pedaço de tubo adequado e colocar no dedo a proteger.

Imagens do Artigo: