



Ayudas Dinámicas

MANUAL DE UTILIZADOR

AD950



DESCRIÇÃO

Este pendural foi projetado para ajudar as pessoas a sentarem-se e a levantarem-se na cama.

Tem uma base em forma de "H" que a torna mais estável. Esta base encaixa debaixo da cama para que não incomode.

Vem com um triângulo e uma correia ajustável para se adaptar à altura dos braços do utilizador.

MONTAGEM

O pendural vem desmontado. Para montá-lo, terá de encaixar a barra vertical na estrutura base e, em seguida, coloque a parte superior em forma de "L" no topo da barra vertical. Uma vez montada a estrutura, pode colocar a correia com o triângulo.

A correia do triângulo é ajustável de acordo com a altura do utilizador.

DADOS TÉCNICOS

Altura - 170cm

Comprimento base - 82cm

Largura da base - 75cm

Peso total - 11kg

Peso máximo do utilizador - 90kg

GARANTIA

A garantia estende-se por 2 anos, de acordo com a Lei 23/2003 de Garantias que refere a todos os defeitos de material ou mão-de-obra.

Os danos causados por desgaste natural ou utilização indevida estão excluídos da garantia.



Importado por:

Ayudas Dinámicas

c/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA
08130 Santa Perpètua (Barcelona)
ESPANHA

Tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74

75

info@ayudasdinamicas.com

www.ayudasdinamicas.com

