

Finalidade: O Kit de compressão e Sobre Colchão de elementos foi projetado para a prevenção e tratamento de escaras, que podem ocorrer em todas as situações, que exigem em longo internamento hospitalar e/ou domiciliário.

Características: Material do colchão: Célula de grau médico- Nylon/PVC; Abas: 50 cm
Peso do compressor: 1,60kg; Peso do colchão: 6,5kg; Peso máximo do cliente: 145 kg
Nº de elementos: 18
Fornecimento de energia: ~ 220V 50/60Hz
Cabo de alimentação: 2,20m
Libertação de ar: 6/7LPM
Tempo de ciclo: 12 min.
Ruído:32-34 dB

Data de inspeção: (Quando Aplicável)

Lote: Verificar embalagem

Cor: Colchão azul, compressor branco e azul

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe II tipo BF

Modelo: LAD463

Marca: Levitas Moretti Série Piuma UP

Dimensões: 200x90x12 mm; compressor: 26X13X10cm

Declaração de Conformidade: Directiva CE 93/42

Fabricante: Moretti S.p.A.

Morada do fabricante: Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Importador e Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Importador e Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR -
qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Para limpar, passar sobre o compressor e o colchão um pano húmido com um detergente suave e mantenha o dispositivo longe de pó. Escolha sempre um detergente que não contenha agentes químicos que possam afetar as superfícies plásticas.

Instruções de Utilização:

Abrir o pacote; 2. O colchão vem enrolado: remova-o da caixa e desenrole o colchão sobre a cama; 3. Dobre e coloque as bordas do colchão entre a cama e o colchão para fixá-lo e evitar movimentos involuntários; 4. Extrair e descompactar o compressor e, em seguida, colocá-lo no topo dos pés da cama por meio dos ganchos da parte traseira do compressor, ou, alternativamente, coloque-o sobre uma superfície plana. 5. Verifique se o interruptor ON/OFF do compressor está na posição OFF; 6. Conectar os tubos à extremidade inferior do colchão e às boquilhas do compressor; 7. Rode o botão para a direita, trazendo a parte mais estreita para o "+". Desta forma, o compressor irá fornecer a pressão máxima; 9. Ligue a ficha do compressor à tomada de corrente de 220V; 10. Ligar o compressor através do interruptor on/off e esperar 25 minutos para o compressor insuflar totalmente o colchão.

Imagens do Artigo:

