



CE



**MARTELO NEUROLÓGICO
MANUAL DE INSTRUÇÃO**



MORETTI

Moretti S.p.A.

Via Bruxelles 3 -Meleto 52022

Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11

Fax.+39 055 96 21 200

www. morettispa.com

info@morettispa.com

I Dispositivo Médico de Classe de acordo com a diretiva CEE 93/42

CÓDIGOS

DMV120 MARTELO NEUROLÓGICO BUCK COM AGULHA E PINCEL

DMV122 MARTELO NEUROLÓGICO BABINSKY

DMV124 MARTELO NEUROLÓGICO TAYLOR

INTRODUÇÃO

Obrigado por comprar um martelo neurológico dimed por Moretti S.p.A. O seu design e qualidade garantem conforto, segurança e fiabilidade ao utilizador. Os Martelos Neurológicos da Moretti S.p.A. foram concebidos para satisfazer todas as suas exigências. Este manual de instruções contém conselhos para a sua segurança e para uma utilização correta do seu equipamento. Em caso de dúvidas, contacte o seu revendedor.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

Os martelos neurológicos são dispositivos realizados para verificar reflexos neurológicos. Estes dispositivos podem ser utilizados apenas por pessoal profissional e treinado.

Declaração de conformidade da CE

Moretti S.p.A. declara sob o seu selo de responsabilidade que os produtos feitos e negociados por Moretti S.P.A. e pertencentes à gama de martelos neurológicos estão em consonância com a Directiva Europeia sobre Dispositivos Médicos (93/42/CEE).

A Moretti garante e declara sob a sua exclusiva responsabilidade o que se segue:

1. Os produtos acima mencionados satisfazem todos os requisitos, de acordo com o Anexo I da diretiva 93/42/CEE, de acordo com o anexo VIIº da sua diretiva anterior à referida diretiva;
2. Os produtos acima mencionados não são dispositivos de medição
3. Os produtos acima mencionados não se destinam a UTILIZAÇÃO EM VALIDAÇÃO CLÍNICA;
4. Os produtos acima mencionados não são estéreis;
5. Os produtos acima mencionados devem ser considerados "Dispositivos Médicos da Classe 1";



6. Não é permitido utilizar as condutas profissionais acima mencionadas, exceto para a utilização indicada pela Moretti S.p.A.;
7. O fabricante coloca todas as documentações técnicas à disposição das autoridades competentes que comprovam o cumprimento da Diretiva 93/42/CEE;

ATENÇÃO!

Estes dispositivos podem ser utilizados apenas por pessoal profissional e treinado. Preste atenção à presença de crianças.

INSTRUÇÕES:

O profissional que utiliza martelos sabe a forma de utilização diferente.

LIMPEZA

Utilize água morna e sabão neutro para limpar o produto.

ADVERTÊNCIAS

Não utilizar o produto para um fim não indicado neste manual. A Moretti declina todas as responsabilidades por quaisquer consequências resultantes de uma utilização incorreta deste produto e ou por uma utilização não indicada neste manual. O fabricante pode modificar o dispositivo ou o manual de instruções sem notificação prévia.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**MARTELO BUCK (DMV120)**

- Pega de liga de zinco, cabeça de PVC
- Comprimento: 18,6 cm
- Altura: 5,6 cm
- Peso: 90 g
- Pino de diagnostico aparafusado na cabeça
- Pincel de diagnostico aparafusado na pega do punho do lha

MARTELO BABINSKY (DMV122)

- Pega de liga de zinco, cabeça de PVC
- Comprimento: 23 cm
- Largura da cabeça: 4,4 cm
- Peso : 97 g

MARTELO TAYLOR (DMV124)

- Pega de liga de zinco, cabeça de PVC
- Comprimento: 18,8 cm
- Largura da cabeça: 2,1 cm
- Peso: 56 g



GARANTIA

O produto tem uma garantia de 2 anos a partir da data de compra que é certificada por recibo ou fatura. O distribuidor reserva-se para reparar ou substituir a parte necessária para corrigir defeitos na sua obra ou mão-de-obra sem qualquer encargo. A garantia não se aplica a danos resultantes do não cumprimento das instruções de funcionamento, acidentes, abusos, alterações ou desmontagem por pessoas não autorizadas. No caso de precisar do produto reparado e cumprir as condições de garantia, envie-o para o retalhista mais próximo, juntamente com o recibo de compra.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Produto: _____

Data de compra: _____

Revendedor autorizado _____

Rua: _____ Lugar _____

Vendido a _____

Rua: _____ Lugar _____

Moretti S.p.a.

INTERNET: www.morettispa.com E-MAIL: info@morettispa.com

MADE in P.R.C.

Moretti S.p.A.

Via Bruxelles 3 - Meleto 52022 Cavriglia
(Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11

Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com

info@morettispa.com